

Gebrauchsanweisung

# Duschhocker



Descosträße 10  
D-76307 Karlsbad-Ittersbach  
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0  
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

---

# Inhaltsverzeichnis Duschhocker

<b>Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>1. Vorbemerkung</b>	<b>2</b>
1.1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung	2
1.2. Lieferumfang und Lieferzustand	2
1.3. Transport/ Verpackung / Auspacken/ Prüfen	3
1.3.1. Auspacken	3
1.4. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel	3
1.5. Richtlinien, Gesetze, Normen	3
1.6. Prüfzeichen	3
1.7. Kennzeichnung und Typenschilder	4
<b>2. Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	<b>4</b>
<b>3. Sicherheit</b>	<b>4</b>
3.1. Gefahren-Gesamteinschätzung	4
3.2. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
<b>4. Bestandteile</b>	<b>5</b>
<b>5. Sitzhöhe verstellen</b>	<b>6</b>
<b>6. Benutzung</b>	<b>6</b>
6.1. Hinstellen und Sitzen	6
6.2. Duschhocker herausnehmen	7
<b>7. Reinigen</b>	<b>8</b>
<b>8. Störungen/ Fehlerbehebung</b>	<b>8</b>
<b>9. Wartung/ Inspektion</b>	<b>8</b>
<b>10. Technische Daten</b>	<b>8</b>
<b>11. Entsorgung</b>	<b>8</b>
<b>12. Garantie</b>	<b>9</b>

## Allgemeines



Für den hier beschriebenen Duschhocker ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Geräte- Nr.:.....

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.  
Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weiterverkauf des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.  
Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.  
Das Urheberrecht liegt beim Herausgeber.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei:



Descosträße 10  
D-76307 Karlsbad-Ittersbach  
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0  
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

## 1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin,  
sehr geehrter Benutzer,

Sie haben sich für ein technisch ausgereiftes und nach dem neuesten Stand der Technik konstruiertes und zuverlässiges Produkt entschieden.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung **bevor** Sie den Duschhocker montieren und benutzen.

Diese Gebrauchsanweisung dient allen Anwendern, insbesondere dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung des Duschhockers.

Diese Anweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und die Handhabungssicherheit beizubehalten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung, halten Sie die vorgegebenen Handlungsanweisungen ein und sorgen Sie dafür, dass die Gebrauchsanweisung für die Benutzer erreichbar bleibt.

Tech.Aut.Lebherz

### 1.1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung



#### **ACHTUNG!**

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn Sie diese nicht vermeiden, können Personenschäden oder Sachschäden die Folge sein.



#### **WICHTIG!**

Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang und Hinweise, die befolgt werden müssen.

### 1.2. Lieferumfang und Lieferzustand

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Den Duschhocker **mit** Rückenlehne **oder**
- Duschhocker **ohne** Rückenlehne
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Verpackungs- und Transportkarton (wiederverwendbar)
- Schraubensicherungs- Klebstoff zum Einkleben der Schrauben

### 1.3. Transport/ Verpackung / Auspacken/ Prüfen

Der Duschhocker wird in gebrauchsbereitem Zustand ausgeliefert, von Fachhandel-Technikern, bzw. vom Betreuungspersonal montiert und die Funktion überprüft.



Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein.

Ist der Inhalt erkennbar beschädigt, unverzüglich das Frachtunternehmen verständigen.



#### **Geräteschaden!**

Bei Fallenlassen besteht die Gefahr der Beschädigung und Funktionsstörung.

#### 1.3.1. Auspacken

Der Duschhocker ist komplett in Folie verpackt. Nach dem Entpacken die Folie nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften entsorgen.



**Folie nicht verbrennen!** Beim Verbrennen können giftige Gase entstehen.

Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. den Lieferunterlagen überprüfen.

### 1.4. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel

Der Fachhandel prüft den Duschhocker

- auf Vollständigkeit,
- auf unbeschädigte Teile, hierbei insbesondere ob die rutschhemmenden Fußkappen vorhanden und unbeschädigt sind,
- ob die Lieferung allgemein ohne Beanstandung zusammengebaut werden kann und die Funktion festgestellt wurde.

### 1.5. Richtlinien, Gesetze, Normen

Angewandte Richtlinien, Gesetze, Normen und Regelwerke:

- Richtlinie des Rates 93/42 EWG, Medizinprodukte
- MPG, (Medizin-Produkte-Gesetz) der Bundesrepublik Deutschland

### 1.6. Prüfzeichen



## 1.7. Kennzeichnung und Typenschilder

Typen und Herstellerschild an der Unterseite



**Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen.**

**Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.**



Tech.Aut.Lebherz

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Duschhocker ist vorwiegend für die Benutzung in Dusch- Waschräumen von Personen bis max. 100 kg Körpergewicht geeignet.

Als Aufstieghilfe oder zu ähnlichen Zwecken darf der Duschhocker nicht verwendet werden.

## 3. Sicherheit

### 3.1. Gefahren-Gesamteinschätzung

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Duschhockers keine Gefahr aus.

Die verwendeten Materialien und die Konstruktion entsprechen den Anforderungen aus den EG-Richtlinien, dem Medizin- Produkte- Gesetz und den Normen für Medizinprodukte.

### 3.2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Der Duschhocker muss sicher auf allen vier Füßen stehen.

Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in nassen Badewannen oder Duschräumen, insbesondere dann wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet wurden.



Achtung!

Bei der Erstmontage des Hockers und nach jedem Zerlegen, müssen die festgedrehten Schrauben abschließend mit Schraubensicherungs-Kleber verklebt werden, um ein selbstständiges Lösen der Schrauben zu vermeiden.

### 4. Bestandteile



Haltegriffe (1)

Sitzfläche (2)

Höhenverstellung (3)

Rutschhemmende Gummisaugfüße (4)

## 5. Sitzhöhe verstellen



Der Duschhocker kann in der Höhe in 5 Stufen der gewünschten Höhe angepasst werden.


Dazu:

An den Füßen **(1)** die Federknöpfe **(2)** hineindrücken und die Füße auf die gewünschte Länge herausziehen.



### Achtung!

Um dem Hocker die notwendige Stabilität zu geben, müssen die Federknöpfe an den Füßen nach dem Verschieben unbedingt wieder an einem Loch austreten und arretieren und alle vier Füße müssen die gleiche Länge aufweisen.

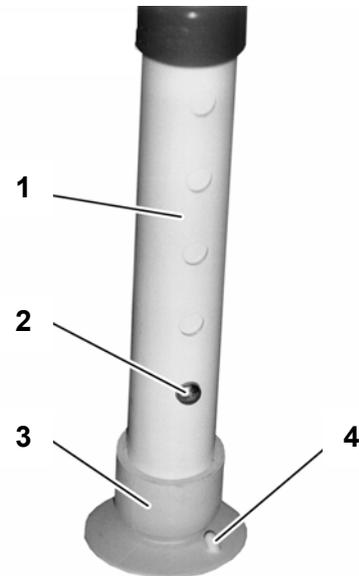

## 6. Benutzung

### 6.1. Hinstellen und Sitzen



### Achtung!

### Kipp- und Ausrutschgefahr!

- Immer in die Mitte des Duschhockers sitzen.
- Immer gerade auf den Duschhocker setzen.
- Zum Hinsetzen oder Aufstehen, die Hilfe der Betreuungsperson nehmen oder an festhalten, besonders dann, wenn oberkörperlabile Personen den Duschhocker nutzen.

Duschhocker so hinstellen, dass:

- Alle vier Füße sicher stehen und
- Die Gummisaugfüße sich festsaugen können
- Der Duschhocker ungehindert besetzt werden kann
- Noch genügend Bewegungsraum bleibt

## 6.2. Duschhocker herausnehmen




### Achtung!

Beim Herausnehmen des Hockers können sich die Füße zusammen schieben und der Hocker mit der Person darauf zusammen brechen, wenn die Arretierstifte durch häufiges Herausziehen des festgesaugten Hockers gelockert sind.

Deshalb immer zuerst die Saugfüße durch Ziehen an der Nase (4) vom Boden ablösen.

1. Die festgesaugten Gummisaugfüße (3) des Duschhockers an der Nase (4) des Saugfußes hochziehen.
2. Den gelösten Fuß angehoben lassen. Denn beim Zurückstellen saugt sich der Fuß wieder an.

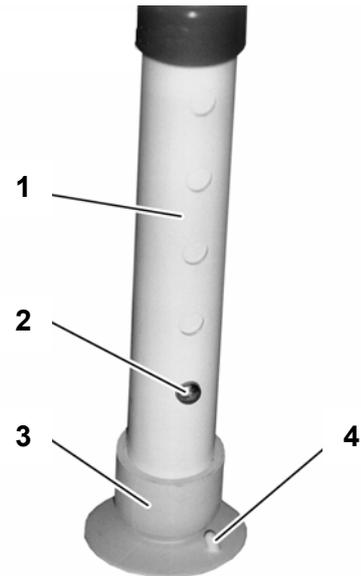

## 7. Reinigen

 Reinigen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

- Den Duschhocker mit einem feuchten Lappen abreiben und
- gelegentlich mit handelsüblichen Mitteln desinfizieren.

## 8. Störungen/ Fehlerbehebung

 Zur Störungsbehebung und Fehlerbeseitigung den Duschhocker an den Fachhandel übergeben. Ausgenommen solche Störungen, die durch Reinigung beseitigt werden können.

## 9. Wartung/ Inspektion

 Die Schrauben und Muttern am Duschhocker sind ständigem Temperaturwechsel ausgesetzt. Deshalb in regelmäßigen zeitlichen Abständen den sicheren Sitz der Schrauben und Muttern prüfen.

 Der Duschhocker ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Hocker dem Fachhandel übergeben.

## 10. Technische Daten

Best.-Nr.										HMV-Nr.
	cm	kg	kg							
* { 000240	50	-	38	29	50	39 - 49	42 - 52	100	2,0	04.40.03.1***
000241	50	72 - 82	45	29	50	39 - 49	42 - 52	100	2,8	04.40.03.2***
000242	48	-	50	37	41,5	38 - 53	-	100	2,2	04.40.03.1***
000242	48	68 - 83	53	37	41,5	38 - 53	-	100	3,1	04.40.03.2***

\*\*\* Nummer ist beantragt

\* für diesen Duschhocker gilt die vorliegende Gebrauchsanweisung.

## 11. Entsorgung

 Wenn der Duschhocker die Nutzungsdauer erreicht hat oder aus anderen Gründen nicht mehr benutzt werden kann, sind die Bestandteile durch den Fachhandel zu entsorgen.

## 12. Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung.

Von der Gewährleistungspflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen welche durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.

Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantie-Urkunde mit einzureichen.

Tech.Aut.Lebherz

<b>Garantie- Abschnitt</b>	
<b>Produkt:</b>	Modellbezeichnung*
	Seriennummer* (vom Typenschild entnehmen)
<b>Fachhändler:</b>	Datum und Stempel