

# Montage- und Bedienungsanleitung für

**MP SIGU 1, SIGU 1XXL, SIGU 2, SIGU 3, SIGU 4 CE**



**SIGU 1**



**SIGU 3**




**SIGU 1 XXL**



**SIGU 4**



**SIGU 2**

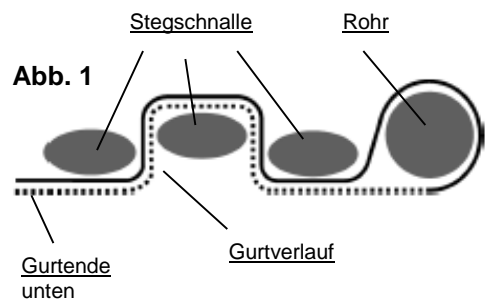

## Der Haltegurt dient ausschließlich zur Fixierung sitzender Personen im Rollstuhl!

Vorteile:

- Die Stabilisierung der Sitzposition im Rollstuhl.
- Abhängig von der Behinderung kann die Person nicht nach vorn aus dem Stuhl fallen.
- Stufenlose Einstellung.




1. Lösen Sie die Stegschnallen an den Gurtenden und legen Sie das Gurtband gemäß Skizze (**Abb. 1** Seitenansicht) um das Sitz- oder Rückenrohr.
2. Ziehen Sie die Gurtenden wieder durch den Schieber fest und stellen Sie für den Patienten die optimale Höhe und Gurtlänge ein.
3. Oder Sie montieren den Gurt mit dem Artikel „**SIGU - LASCHE**“ am Rahmen, Rohr, Sitz oder Rücken des Rollstuhles. Beachten Sie hierbei die Montageanleitung der Rollstuhlhersteller.
4. Je nach Montagehöhe des Gurtes wird nur Becken oder Oberkörper gehalten. Bei Patienten mit sehr instabilem Oberkörper kann ein weiterer Gurt erforderlich sein.
5. Zur Herstellung größtmöglicher Sicherheit müssen nach dem Einstellen des Haltegurtes die Enden durch das Gurtmaterial mittels einer Schraube mit dem Rücken- / Rahmenrohr, Sitz oder Rücken verschraubt werden. Dazu kann jede selbstschneidende Metallschraube durch das Gurtmaterial geschraubt werden. Das Durchschrauben kann durch Vorstechen mit einer Stechahle erleichtert werden.

6. Das Schloss des Haltegurtes lässt sich durch Drücken der roten Taste leicht öffnen und schließen.
7. Ziehen Sie beide Gurtenden nach vorn.
8. Der Haltegurt wird vor dem Körper geschlossen.
9. Schieben Sie die Schlosszunge in das Schlossteil. Die Zunge muss hörbar einrasten.
10. Beim Schließen darf keine Kleidung oder Ähnliches eingeklemmt werden.
11. Die Länge wird durch Ziehen des Gurtbandes an der Zunge eingestellt.
12. Den Haltegurt am losen Gurtende straff ziehen.
13. Mit der Kunststoffschlaufe wird die nicht benötigte Gurtlänge gesichert.

### **Sicherheitshinweis:**

Klemmen Sie nichts unter dem Gurt ein, es könnte schmerzhafte Druckstellen verursachen.

Verdrehen Sie den Gurt nicht und schließen Sie ihn bei Nichtgebrauch hinter dem Rücken. Sie vermeiden so ein Verfangen in den Speichen.

-  **Defekte Haltegurte dürfen nicht mehr verwandt werden und müssen unverzüglich ausgetauscht werden.**
-  **Haltegurte müssen körpernah anliegen. Auf die Sitzgenauigkeit der Gurte ist zu achten. Lose sitzende Gurte können Unfälle wie z.B. Strangulationen hervorrufen**
-  **Bei Verwendung unserer Haltegurte bei Patienten mit spastischer Lähmung müssen die Endschlaufen vernäht werden!!**

**Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden MPB® SIGU Haltegurtes und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Montage- und Bedienungsanleitung erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.**