

## Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Bezeichnung	Füllmenge	Art.-Nr.	Gewicht	max. Körpergewicht
Malta	Dusch-/Bbadestuhl	367.54.30	19,3 kg	130 kg

## Zubehör

Artikel-Nr.	Benennung	Bemerkung/Farbe
467.54.00	Sitzwanne-Malta	blau
440.10.59	PUR-Rückenpolster	schwarz
440.10.62	PUR-Duschsitzauflage	schwarz
440.10.04	PUR-Duschsitz mit Pflegeöffnung	schwarz

## Abmaße

Maße (ca.)	Stuhl	Wanne
Höhe	104 cm	
Breite	74 cm	
Tiefe	90 cm	
Sitzbreite	64 cm	
Sitzhöhe	48 cm	
Sitztiefe	48 cm	
Fußhöhe verstellbar	7fach	
Radhöhe	12,5 cm	
Wannenhöhe		17 cm
Wannenbreite		56 cm
Wannentiefe		42,5 cm
Füllmenge		6-15 Liter

## Hinweis !

[Betriebsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.](#)

Die identische Seriennummer in der BA ist auch auf dem Typenschild des Produktes aufgedruckt. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte Typ, Serien-Nr. und BA-Nr. an.

## Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz bestimmt. Der Wiedereinsatz (Lebensdauer) ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die entsprechenden Anweisungen zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten. Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

## Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **5 Jahre**.

Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.



## Betriebsanleitung

BA-Nr.: 01.07.047/11-09



**REBOTEC** Rehabilitationsmittel GmbH  
 D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
 Telefon: 05431/9416-0  
 Telefax : 05431/9416-66  
<http://www.rebotec.de>  
 e-mail: info@rebotec.de

Serien-Nr. /Produkt



## Dusch- und Badestuhl

„Malta“  
 Art.-Nr.: 367.54.30/130 kg



## Verwendungszweck/Anwenderhinweise

Der Dusch- und Badestuhl findet seine Anwendung im häuslichen und stationären Bereich. Er dient zur Durchführung von Sitzbädern und Reinigung im Unterleibsbereich. Trotz optimalen Sitzkomforts ist der Stuhl für längeres Sitzen nicht geeignet.

### Der Dusch- und Badestuhl ist kurzzeitig im Nassbereich verwendbar.

Der Stuhl besteht aus einem korrosionsbeständigen Rahmen und vier vollgummierten Lenkrollen (5-Zoll) mit 2 Feststellern. Die Armlehnen sind abschwenkbar und die Fußstützen lassen sich abnehmen, abklappen und sind höhenverstellbar. Die Sitzwanne ist mit einem Ablaufschlauch ausgestattet. Der Kunststoff ist strapazierfähig und schmutzunempfindlich sowie hautfreundlich.

### Pflege und Wartung (Wartungsbuch anfordern BA-Nr.: D-01.10.071)

Der Stuhl sollte mit milden handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel gereinigt werden –Produktinformationen beachten. Alle beweglichen Teile sind dauergeschmiert. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung vorzunehmen. Prüfen Sie alle Verschraubungen auf festen Sitz und überprüfen Sie, ob der einwandfreie Betriebszustand durch Kalkab-lagerungen eingeschränkt wird (notfalls säubern!).

Die Ursache von Unfällen kann sein, nicht rechtzeitig erkannter Verschleiß oder durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden.

**Aus Sicherheitsgründen und zur Vorbeugung von Unfällen sollte der Stuhl deshalb mindestens in einem jährlichen Abstand von Ihrem örtlichen Fachhändler, Sanitätshaus oder Wartungsservice überprüft werden!**



### Sicherheitshinweise

- **Stühle dürfen nicht für einen längeren Patiententransport verwendet werden.**
- Den Stuhl stets gegen Wegrollen sichern! Auch bei Nichtgebrauch.
- Fußauflagen beim Ein-/Aussteigen hochklappen. Niemals auf die Fußablage treten.
- Den Stuhl nur mit eingerasteter Armlehne verwenden.
- **Achtung-Kippgefahr!** Der Stuhl darf nur an dem Schiebegriff geschoben werden.
- Den Stuhl nur im Innenbereich und auf festem ebenem Untergrund benutzen.
- Mit dem Stuhl nur im gemäßigten Schritttempo fahren.
- **Achtung-Kippgefahr!** Nicht aus dem Stuhl herauslehnen. Bei ungünstiger Stellung der Lenkrollen (nach innen weisend) ist die Standfestigkeit eingeschränkt.
- Den Stuhl nicht mit Insassen tragen.

## Montageanweisung

Das Produkt wird nicht komplett montiert in der Verpackung angeliefert. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Montagevorgänge durchzuführen:

1. Schwenken Sie die Armlehne nach hinten, stecken die Rückenlehne auf die Edelstahlrohre des Stuhlkörpers und schieben diese bis zum Anschlag auf das Untergestell.
2. Schwenken Sie die Armlehnen wieder so weit nach vorne, dass diese in der Nut an der Rückenlehne, als auch mit dem Rastbolzen in das Untergestell einrasten.
3. Drehen Sie die Fußstützen soweit nach vorne, bis diese selbstständig einrasten.
4. Klappen Sie die Fußauflagen nach unten. Eventuell die Fußhöhe einstellen.

### Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme des Stuhles sind folgende Handhabungen zu beachten:

#### Abschwenken der Armlehne

Durch Herausziehen des Rastbolzens wird die Arretierung gelöst und die Armlehne lässt sich nach hinten abschwenken. Beim Hochklappen der Armlehne überprüfen Sie den richtigen Sitz der Einrastung an der Rückenlehne und des Rastbolzens. Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle der Verriegelung durch, da durch eventuelle Kalkablagerungen an den Arretierungen die Gängigkeit beeinträchtigt werden kann.

#### Anpassen der Fußauflagenhöhe

Die Fußauflage ist stufenweise höhenverstellbar (7-fach). Dazu schrauben sie seitlich die schrauben an der Fußstütze mit einem Inbuss-Schlüssel (SW6) heraus. Wählen Sie die entsprechende Höhe aus und schrauben die Fußauflage wieder fest. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schrauben.

#### Abklappen der Fußstützen

Schwenken Sie zunächst die Fußauflagen nach oben und heben dann die Fußstütze leicht an. Die Fußstütze lässt sich nun seitlich nach hinten abklappen.

#### Abnehmen der Fußstützen

Entfernen Sie zuerst die Sitzwanne. Heben Sie die Fußstütze um ca. 10 cm an (bis oberhalb der Querstrebe) und drehen diese um 90 Grad nach außen. Jetzt können Sie die Fußstütze ganz nach oben schieben und herausziehen.

#### Abnehmen des Rückenpolsters

Das Rückenpolster ist an der Rückenlehne mit Noppen befestigt. Drücken Sie gegen die Noppen, so löst sich das Rückenpolster und kann abgenommen werden.

#### Radfeststeller

Treten Sie den Betätigungshebel (ROT) an den Rädern nach unten. Die Räder sind nun gebremst und richtungsgestellt. Das Lösen der Räder erfolgt durch Anheben des Betätigungshebels.

#### Sitzwanne



Zur besseren Handhabung bei der Reinigung kann die Sitzwanne vom Stuhlrahmen abgenommen werden (Sitzwanne vorher entleeren).

Die Sitzwanne ist mit einer Anschlussgarnitur für das Ablassen des Wassers ausgestattet.