



Das SEGUFIX[®]-System

- Humane Fixierung mit vielen Variationsmöglichkeiten -

SEGUFIX[®] - der sichere Weg



SEGUFIX[®]
Dreh-Schloss

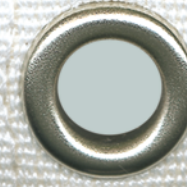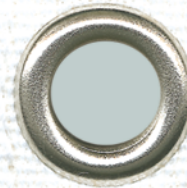

Katalog 2014

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH





Das Notwendige human gestalten

Ein altes Problem

Schon in der Antike war bekannt, dass die Ruhigstellung von Patienten ein wesentlicher Beitrag zur Heilbehandlung sein kann. Die damit verbundene Fixierung an Händen und Füßen konnte jedoch auch heilungsverzögernde Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Wundliegen und Angstzustände. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts änderte sich an diesen Fixierungsmethoden nichts, bis die gleichermaßen einfache und brillante Idee eines besorgten Vaters ein neues Kapitel in der Geschichte der Patientenfixierung eröffnete.

Die Not eines Kleinkindes

Besagter Vater hatte einen zweijährigen Sohn, der an Lungenentzündung erkrankt war. Als der junge Patient sich gegen die notwendige Bettruhe sträubte, sahen die Ärzte keine andere Möglichkeit, als den Jungen an Händen und Füßen zu fesseln. Völlig verstört und verängstigt verweigerte der Junge daraufhin jegliche Nahrungsaufnahme. Angesichts dieses neuen Problems ordneten die Ärzte Zwangsernährung an. Für die verzweifelten Eltern war diese Situation nicht zu ertragen, und sie nahmen ihren Sohn auf eigene Verantwortung mit nach Hause.

Liebe macht erfinderisch

In der gewohnten Umgebung ging es dem Jungen zwar schnell besser, aber auch dort wollte er nicht im Bett bleiben. Da hatte der Vater die Idee für einen Haltegurt, der seinen Sohn zwar im Bett fixieren würde, dabei aber viel Raum für Bewegung bot und vor allem Hände und Füße frei ließ. Der Junge akzeptierte den Haltegurt, blieb im Bett und konnte rasch genesen.

Eine Lösung für viele

Einige Jahre später erfuhr der Vater von den Defiziten der Patientenfixierung in der Medizin. Viele Patienten mussten leiden, weil sie die Bettruhe nicht einhielten oder aus dem Bett fielen – ein Problem, das er schon Jahre zuvor für seinen Sohn gelöst hatte.

Renommierte Mediziner erkannten den Nutzen für Patienten und Pflegepersonal. Prof. Dr. Dr. h.c. Bürger-Prinz führte die neue Fixierung an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) ein. Das SEGUFIX®-System stieß in den Fachkreisen sofort auf große Zustimmung und war wenig später als die international anerkannte Patientenfixierung etabliert.

So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig

Medizinische Anforderungen an Fixierungen sind vielseitig, und manchmal ist es erforderlich, auch Gliedmaßen zu fixieren. Um den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde unser Produktangebot in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal stetig erweitert. Bei allen Neuentwicklungen befolgen wir unseren Leitsatz „So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig.“

Die humane Fixierung

Entsprechend bietet das SEGUFIX®-System anspruchsvolle Lagerungs- und Fixierlösungen für Patienten und Pflegepersonal. Diese Lösungen ermöglichten erstmals zielgerichtete Fixierung und verhindern dadurch die menschenunwürdige Überfixierung vergangener Tage. Aus diesem Grund ist in medizinischen Fachkreisen das SEGUFIX®-System bei seiner Einführung übereinstimmend als „humane Fixierung“ bezeichnet worden. In allen Bereichen der Patientenpflege und auch in schwierigen Pflegesituationen stellt die humane Herangehensweise für alle Betroffenen eine wesentliche Erleichterung dar.

Beständigkeit in der alltäglichen Pflege

Als Erfinder und Hersteller des SEGUFIX®-Systems freuen wir uns, Ihnen Produkte anzubieten, die Ihnen helfen, Ihre Pflegeaufgaben sicher und verlässlich auszuführen.

Als Familienunternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung stehen wir Ihnen auch weiterhin mit Kontinuität, Qualität und Professionalität zuverlässig zur Seite.

Ihre Familie Sánchez-Wysozki

Produktgruppen

Produktgruppe 1000 - SEGUFIX®-Verschluss-Systeme



Produktgruppe 2000 - SEGUFIX®-Bandagen-System



Produktgruppe 3000 - SEGUFIX®-Zusatz-Gurte



Produktgruppe 4000 - SEGUFIX®-Akut-System



Produktgruppe 5000 - SEGUFIX®-Mobile-Fixierung



Produktgruppe 6000 - SEGUFIX®-Transport-System



Produktgruppe 7000 - SEGUFIX®-Sitzgurt-System



Produktgruppe 8000 - SEGUFIX®-Zubehör, Schaffelle und Einzelteile



Verschluss-Systeme
Art.-Nr. 1106 - 1215

Bandagen-System
Art.-Nr. 2203 - 2250

Zusatz-Gurte
Art.-Nr. 3110 - 3245

Akut-System
Art.-Nr. 4213 - 4235

Mobile-Fixierung
Art.-Nr. 5204 - 5245

Transport-System
Art.-Nr. 6040 - 6276

Sitzgurt-System
Art.-Nr. 7240 - 7280

Zubehör / Einzelteile
Art.-Nr. 8010 - 8022

Allgemeine Informationen	Seite
Historie: Das Notwendige human gestalten	2
Übersicht Produktgruppen 1000 - 8000	3
Inhaltsverzeichnis	4 - 5
SEGUFIX®-Ampel-System und individuelle Stationskennzeichnung	6 - 7
Sicherheitshinweise	8 - 9
Produktinformation/Pflegehinweise	10
Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen	11

SEGUFIX®-Verschluss-Systeme

Art.-Nr.	Produkte 1000	Seite
1206	• SEGUFIX®-Schloss	12
1208	• SEGUFIX®-Magnetschlüssel	12
1209	• SEGUFIX®-Magnetschlüssel mit Anhänger	12
1210	• SEGUFIX®-Dreh-Schloss	13
1212	• SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel	13
1213	• Steck-Schloss	13
1215	• Steck-Schloss-Schlüssel	13

SEGUFIX®-Bandagen-System

Art.-Nr.	Produkte 2000	Seite
2203	• SEGUFIX®-Schulterhalterung	19
2204	• SEGUFIX®-Handhalterung	20
2205, 2205/v	• SEGUFIX®-Fußhalterung	21
2211, 2211/v	• SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung	22
2212	• SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung	19
2217	• SEGUFIX®-Kopfhalterung	23
2221, 2221/v	• SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	14 - 15
2222	• SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt	16
2224, 2224/v	• SEGUFIX®-Handhalterung verlängert	20
2231, 2231/v	• SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	17 - 18
2232	• SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten	18
2250/r	• SEGUFIX®-Kompakt	23

SEGUFIX®-Zusatz-Gurte

Art.-Nr.	Produkte 3000	Seite
3110/r	• SEGUFIX®-Beinbügelgurt	25
3240 - 3245	• SEGUFIX®-Verlängerungsgurte	24 - 25

SEGUFIX®-Akut-System

Art.-Nr.	Produkte 4000	Seite
4213/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter	26
4214/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand	26
4215/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß	26
4233/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter	27
4234/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand	27
4235/r	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß	27

SEGUFIX®-Mobile-Fixierung

Art.-Nr.	Produkte 5000	Seite
5204/r	• SEGUFIX®-Handfixiergürtel	31
5218, 5218/v	• SEGUFIX®-Fixierhilfe	30
5243	• SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter	28
5245, 5245/v	• SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß	28 - 29

SEGUFIX®-Transport-System

Art.-Nr.	Produkte 6000	Seite
6040	• SEGUFIX®-Schrittpolster für den Rückhaltegurt	33
6210/v, 6216/v	• SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	32
6220	• SEGUFIX®-Hosenträgergurt	33
6230/v	• SEGUFIX®-Rückenlehngurt	32
6240, 6244	• SEGUFIX®-Rückhaltegurt	33
6250/v, 6256/v	• SEGUFIX®-Multigurt	34
6260, 6266	• SEGUFIX®-Beckengurt	35
6276	• SEGUFIX®-Beckenhosengurt	35

SEGUFIX®-Sitzgurt-System

Art.-Nr.	Produkte 7000	Seite
7240, 7240/v, 7246	• SEGUFIX®-Sitzgurt	36
7250, 7256	• SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt	37
7260, 7266	• SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten	38
7270/v	• SEGUFIX®-Handmanschette Transport	39
7280, 7280/v	• SEGUFIX®-Fußhalterung Transport	39

SEGUFIX®-Zubehör

Art.-Nr.	Produkte 8000	Seite
8010, 8011	• SEGUFIX®-Schaffell-Produkte	40
8012	• SEGUFIX®-Schaffell-Einlagen für SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und Oberschenkelmanschetten	40
8013	• SEGUFIX®-Schutzbezug	41
8014	• SEGUFIX®-Transport-Tasche	42
8015	• SEGUFIX®-Bereitschaftstasche	42
8016	• SEGUFIX®-Aufrichter	41
8017	• Anti-Rutsch-Auflage	41
8019/D	• SEGUFIX®-Handbuch	42
8022	• SEGUFIX®-Wäschenetz	42


SEGUFIX®-Einzelteile

Art.-Nr.	Produkte 1000 bis 8000	Seite
1106 - 1114	• SEGUFIX®-Verschluss-Systeme	43
2005 - 2150/re	• SEGUFIX®-Bandagen-System	43 - 46
3140 - 3110/r	• SEGUFIX®-Zusatz-Gurte	47
4113/r - 4115/re	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung	47
5101/r - 5145	• SEGUFIX®-Tragen-Fixierung / Mobile-Fixierung	48
6040 - 6176	• SEGUFIX®-Transport-System	48
7140 - 7180	• SEGUFIX®-Sitzgurt-System	49
8020 - 8021	• SEGUFIX®-Etiketten	49

Sonstiges

	Seite
• Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen	50
• Bestellformular	51

Orientierende Produktkennzeichnung

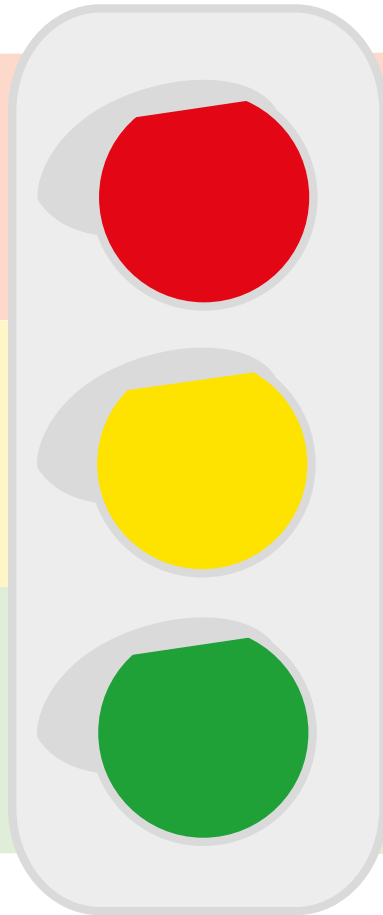

ROT → **Schulter und Kopf**

SEGUFIX®-Schulterhalterung
 SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung
 SEGUFIX®-Kopfhalterung
 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter
 SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter


GELB → **Taille und Hand**

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt
 SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten
 SEGUFIX®-Handhalterung
 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand
 SEGUFIX®-Kompakt
 SEGUFIX®-Handfixiergürtel

GRÜN → **Oberschenkel und Fuß**

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung
 SEGUFIX®-Fußhalterung
 SEGUFIX®-Verbindungsgurt
 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß
 SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß
 SEGUFIX®-Beinbügelgurt

SEGUFIX®-Ampel-System

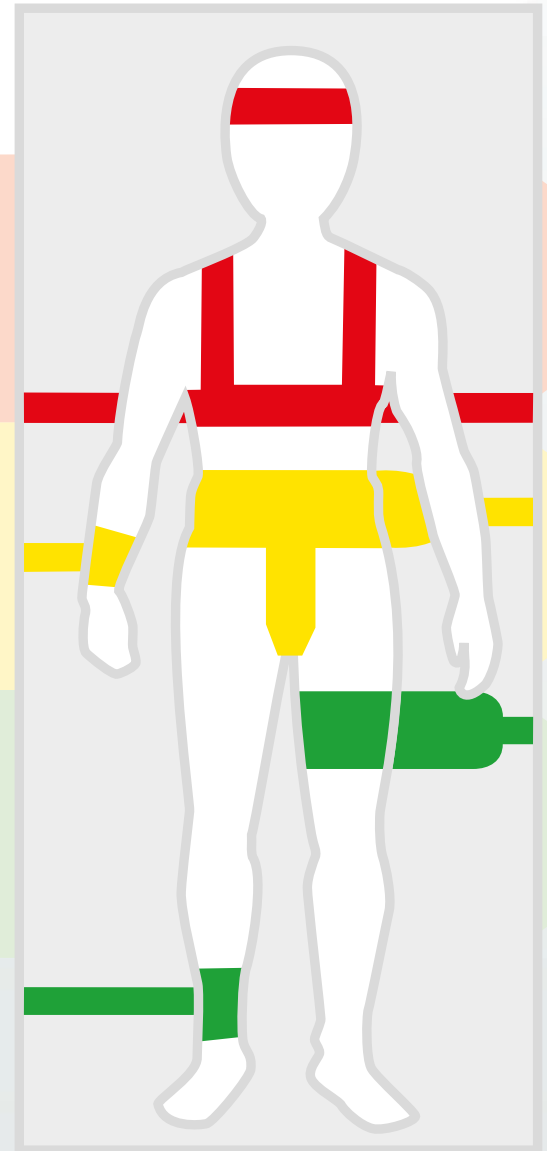

BLAU → **Zusatz-Gurte**

SEGUFIX®-Verlängerungsgurte



WEISS → **Transportbereich**

SEGUFIX®-Sitzgurte
 SEGUFIX®-Rückhaltegurte
 SEGUFIX®-Beckengurte
 SEGUFIX®-Multigurte
 SEGUFIX®-Leibgurte-Transport
 SEGUFIX®-Rückenlehngurte
 SEGUFIX®-Hosenträgergurte



Die farbigen SEGUFIX®-Etiketten bieten Ihnen arbeits- erleichternde Orientierungshilfen und folgende Vorteile:

- schnelle und zuverlässige Orientierung bei der Zuordnung von SEGUFIX®-Gurten durch auffällige Farbgebung
- Einteilung der Körperbereiche nach Ampel-Farben rot/gelb/grün (siehe Illustration linke Seite)
- eindeutige Identifizierung des Gurtes durch Artikel-Nummer und Produktkennzeichnung (mehrsprachig)
- schnelle Erfassung der Größe durch auffallende Positionierung
- Pflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1

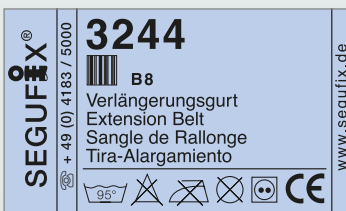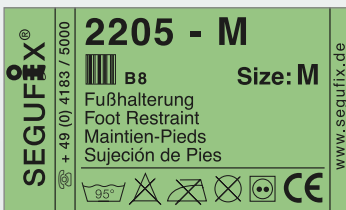

Das SEGUFIX®-Ampel-System begleitet Sie zur besseren Orientierung bei den einzelnen Produkten durch diesen Katalog.

Das farblich gestaltete Ampel-symbol entspricht der Farbe des Etiketts und kennzeichnet den betreffenden Körperbereich.

SEGUFIX®-Etiketten

Zusatztext nach Ihren Angaben

- kundenspezifischer Zusatztext (z. B. Angaben von Station/Haus/Patient)
- schnelle und somit einfache Verteilung nach der Wäsche auf die Stationen bzw. Wohnbereiche
- Lieferung nach Etikettfreigabe
- Preis pro Etikett 2,20 Euro
- für bereits gekaufte Ware können Etiketten für 2,80 Euro/pro Gurt nachgerüstet werden
- Wäschetrockner verringern die Haltbarkeit



Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sind nur gültig für Original SEGUFIX®-Produkte. Benutzen Sie das SEGUFIX®-System nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisungen gelesen und verstanden haben. Fehlerhafte Anwendung des SEGUFIX®-Systems kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, auch mit tödlichem Ausgang. Die Sicherheit Ihres Patienten hängt davon ab, dass Sie das SEGUFIX®-System korrekt anwenden.

SEGUFIX® - Die indikationsgerechte Methode für die Pflege.

1. Anwendungsvoraussetzungen:

Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten. SEGUFIX®-Produkte dürfen nur von **geschultem und qualifiziertem** Pflegepersonal und pflegenden Angehörigen, die mit der korrekten Anwendung vertraut sind, benutzt werden. Gesetzliche Bestimmungen und ärztliche Anordnungen sind strikt einzuhalten! Es ist darauf zu achten, dass der Gesundheitszustand des Patienten die Anwendung des SEGUFIX®-Systems zulässt.

2. Verwendungszweck:

SEGUFIX®-Produkte dürfen ausschließlich für die bestimmungsgemäßen medizinischen Verwendungszwecke benutzt werden.

3. Gefährliche Gegenstände entfernen:

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung führen können, oder mit denen der Patient die Gurte beschädigen kann (z. B. Brille, Schmuck, scharfe Gegenstände).

4. Überprüfung der Gurtsysteme vor jeder Benutzung:



Vor Benutzung muss das Produkt auf schadhafte Nähte, abgerissene Teile und beschädigte Ösen untersucht werden. Schadhafte Produkte können die Funktion beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Beschädigte oder verschlissene Produkte nicht mehr einsetzen.

5. Überprüfung der Verschluss-Systeme vor jeder Benutzung:



Schlösser, Steck-, Metallschlaufen-, Schnapp- und Klettverschlüsse auf Funktion und sicheren Halt prüfen. Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen! Dies kann zu Fehlfunktion führen. Sollten beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Magneten zu öffnen sein, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden. Den Sockelkopf auf Verschleiß (Abrundung/Stauchung) überprüfen.

6. Schlösser dürfen nicht unter Zug stehen:

Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit des schwarzen Knopfes sicher gestellt sein. Deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden (Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte. Bei diesen Gurten sind maximal 3 Gurtlagen zu verwenden!).

7. Warnhinweis Herzschrittmacher:



Bei Patienten mit Herzschrittmacher muss ein Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Herzschrittmacher und Magnetschlüssel eingehalten werden, da sonst bei dem Patienten Tachykardien ausgelöst werden können (alternativ: Steck-Schloss verwenden). Bezüglich möglicher Beeinträchtigung anderer Patienten-Implantate durch starke Magnete bitte die jeweiligen Herstellerangaben beachten.


8. Befestigung der Gurte überprüfen:

Die korrekte Befestigung der Gurte regelmäßig überprüfen. Die Gurte müssen straff am Bettrahmen oder am höhenverstellbaren Kopf- oder Fußteil angebracht werden und dürfen nicht verrutschen.

9. Nur Original SEGUFIX®-Produkte benutzen:

Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen SEGUFIX®-Produkte nicht verändert oder mit Fremdprodukten kombiniert werden.

10. Benutzung des SEGUFIX®-Systems in Fahrzeugen:

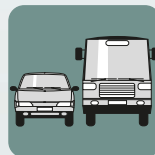

In Automobilen ersetzen SEGUFIX®-Transportgurte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt-/Beckengurt). SEGUFIX®-Transportgurte dürfen nur als zusätzliche Stützung oder Fixierung des Patienten angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im Notfall schnell gerettet werden kann (sichtbar angebrachte Gurtschneider).

11. Sicher, aber nicht zu eng:

Die Fixierung muss eng anliegen, darf aber die Atmung und Blutzirkulation nicht behindern. Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.

12. Brenneigenschaft des SEGUFIX®-Bettsystems:



Nach DIN EN 71-2:03 Abschnitt 4.3 nicht entflammbar. Nach DIN 75200 Brenngeschwindigkeit null. Selbstverständlich dürfen die Produkte nicht mit glühenden Zigaretten in Kontakt kommen oder offenen Flammen ausgesetzt werden, da dies zu nachhaltigen Beschädigungen und Gesundheitsschäden führen kann.

13. Immer die richtige Größe wählen:

Achten Sie darauf, die richtige Größe gemäß der Körper- und Taillenmaße zu wählen (siehe Größentabelle Produktseiten). Zu große bzw. zu kleine Produkte beeinträchtigen Komfort und Sicherheit des Patienten.

14. Gutachterliche Empfehlung zur Unfallvermeidung (Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, TU-Berlin):

1. Seitenbefestigungen anlegen
2. Durchgehende Bettgitter hochstellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung)
3. Es kann notwendig sein, weitere Fixierelemente einzusetzen, um ein Entkommen aus dem Bett sicher zu verhindern.

Warnhinweise



15. Benutzen Sie die Seitenbefestigungen!

Die SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten ist nur mit angebrachten Seitenbefestigungen anzuwenden. Ohne Seitenbefestigungen kann der Patient mit dem Bauchgurt rotieren oder über den Bettrand rutschen und sich strangulieren, mit möglicher Todesfolge. Es kommt vor, dass Patienten auch bei angebrachten Seitenbefestigungen und hochgestellten Bettgittern über den Bettrand gelangen. In diesen Fällen müssen zusätzliche Fixierungsmaßnahmen erfolgen.

Wichtig: Führen Sie die Seitenbefestigungen – vor dem Festmachen – durch die jeweiligen Textilschlaufen auf dem breiten Bettgurt, der auf der Matratze aufliegt (siehe Abbildung in der Gebrauchsanweisung).

16. Bei Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen ist zu beachten:

- SEGUFIX®-Produkte nur mit Betten, standfesten Sitzgelegenheiten bzw. Tragen verwenden, die eine Anbringung gemäß Gebrauchsanweisung erlauben.
- Die Produkte müssen so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen können.
- Beachten Sie dabei, dass Fixiergurte und Bewegungsmechanismus von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen o. ä., Tragen oder Sitzgelegenheiten sich gegenseitig beeinträchtigen können, mit der Folge von Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen.
- Die ausgewählten Haltepunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.

- SEGUFIX®-Produkte verhindern nicht das Umkippen oder Wegrollen von Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen.

Hilfreich in diesem Zusammenhang:


Normen für Betten:

DIN EN 60601-2-52

Normen für Rollstühle:

DIN EN 12182 und DIN EN 12183


17. Bettgitter müssen hochgestellt sein:

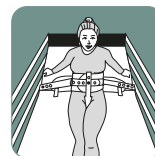

Um Unfälle bei der Fixierung zu vermeiden, sind die Bettgitter hochzustellen (Ausnahme: 5-Punkt Fixierung). **Achtung:** Bei geteilten Bettgittern ist ein „Gap protector“ (Einsteckscheiben), der ein Hindurchrutschen des Patienten verhindert, zu verwenden.

Bei geteilten Bettgittern kann es sonst vorkommen, dass der Patient trotz angelegter Fixierung durch die vorhandene Öffnung hindurchrutscht – mit der möglichen Folge der Strangulation.

18. Patienten in Fixierung überwachen:

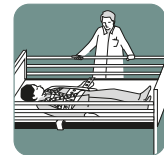

Patienten in Fixierung erfordern regelmäßige Überwachung. Aggressive, aufgebrachte und unruhige Patienten oder solche, bei denen die Gefahr der Aspiration besteht, erfordern eine ununterbrochene Überwachung.

Größentabelle Taillenumfang: SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten

XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Pflegeanleitung

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß) sind bis 95°C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8% Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche.
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur.
Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich (Ziffer 3.1.2 "Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren"). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.
- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig) sind bis zu 30°C in der Waschmaschine waschbar. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche.
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur.
- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel** vor der Reinigung (Waschvorgang) entfernen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht mehr oder nicht mehr zuverlässig. Verschmutzte Schlösser mit einem feuchten Tuch reinigen, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen.
- **SEGUFIX®-Klettverschlüsse** sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, damit der Klettverschluss nicht verflust. Klettverschlüsse von Zeit zu Zeit mit harter Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch Haltekraft überprüfen.
- Die **Haltbarkeitsdauer** hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.
- **SEGUFIX®-Schaffelle:** Die Pflegeanleitung für medizinische Schaffelle finden Sie auf Seite 40.



Wäschenetz:

Das SEGUFIX®-Wäschenetz schützt das Gurtmaterial beim Waschvorgang.

Mehr Informationen siehe Seite 42.

Sonderanfertigungen:

Als Entwickler und Erfinder des SEGUFIX®-Systems fertigen wir gerne von den Standardmaßen abweichende Produkte nach Ihren Vorgaben an.

Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen

Grundauführung




Ausführung f – Flausch

- Für empfindliche Haut
- Hautfreundliche Polsterung
- Angenehm und weich
- 100 % reine Baumwolle



Ausführung r – robust

- Verstärkte Ösengurte für hohe Beanspruchung

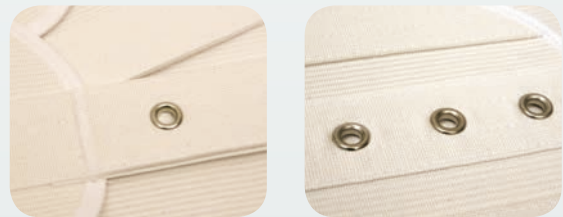

Ausführung e – extra lange Betthalterung

- Ab einer Bettbreite von über 1 m, Betthalterungen auf jeder Seite ca. 20 cm länger



Ausführung v – Velcro® / Klettverschluss / Metallschlaufenverschluss

- Lagerungshilfe
- Keine Fixierung



Hinweis:

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.



SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz/ segufix.com

Zum sicheren Verschließen der
SEGUFIX®-Systeme

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
1206	6,40	11238070



SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot

Zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-
Magnetschlusses schwarz

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
1208	4,00	11238153



SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot mit Anhänger

Zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-
Magnetschlusses schwarz

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
1209	4,60	09168327



SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz/ segufix.com

Ohne SEGUFIX®-Metallsockel

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
1106	4,60	11238087



SEGUFIX®-Metallsockel

Für SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
1117	1,90	09169551

Wichtig:

SEGUFIX®-Schlösser dürfen nicht
mitgewaschen werden. Schlösser
mit einem feuchten Tuch reinigen.
Nicht in Flüssigkeit tauchen.

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer



SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss grün Zum sicheren Verschließen der SEGUFIX®-Systeme (für Bandagen ab Herstellungsquartal II/2003) Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1210	11,60	11238176



SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel gelb Zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlusses grün Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1212	6,40	11238182



SEGUFIX®-Dreh-Magnetknopf grün Ohne SEGUFIX®-Vierkantsockel Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1110	6,40	11238199




SEGUFIX®-Vierkantsockel Für SEGUFIX®-Dreh-Magnetknopf grün Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1111	5,20	09169574



Steckschloss - Zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme - Ohne Magnetmechanismus - Kann in unmittelbarer Nähe zum Herzschrittmacher verwendet werden Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1213	19,80	09168362



Steckschlüssel Zum Öffnen des Steckschlusses Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0999 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0999	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	1215	10,50	-

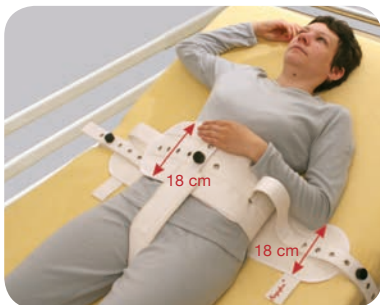

Fixiervariante mit Art.-Nr. 2221 und 2203 und extra SEGUFIX®-Schloss



Für schmale Erwachsene




Ausführung f mit Flausch

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und Magnetverschluss

Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (mit integrierten Seitenbefestigungen)
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

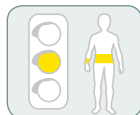

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5017
Pflegehilfsmittelnummer: 50.40.02.5017


Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2221 - M	138,30	09171269
2221 - L	149,00	09171275
2221/e - M	138,30	09171281
2221/e - L	149,00	09171298
2221/r - M	154,00	09171306
2221/r - L	166,30	09171312
2221/r - XL	194,60	-
2221/re - M	154,00	09171329
2221/re - L	166,30	09171335
2221/re - XL	194,60	-
2221/f - M	173,20	-
2221/f - L	192,70	-
2221/ef - M	173,20	-
2221/ef - L	192,70	-
2221/rf - M	193,45	-
2221/rf - L	215,85	-
2221/rf - XL	269,10	-
2221/ref - M	193,45	-
2221/ref - L	215,85	-
2221/ref - XL	269,10	-

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und Magnetverschluss

Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (mit integrierten Seitenbefestigungen)
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

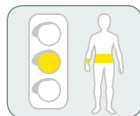

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5017
Pflegehilfsmittelnummer: 50.40.02.5017

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2221 - S	138,30	09171341
2221/e - S	138,30	09171358
2221/r - S	154,00	09171364
2221/re - S	154,00	09171370
2221/f - S	173,20	-
2221/ef - S	173,20	-
2221/rf - S	193,45	-
2221/ref - S	193,45	-

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



Fixiervariante mit
Art.-Nr. 2221 und 2203 und
extra SEGUFIX®-Schloss



Bauchgurt:
Größe XS/S: 14 cm
Größe M/L: 18 cm

Bettgurt:
Größe XS: 14 cm
Größe S/M/L: 18 cm

****Hinweis Klettverschluss:**

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.


SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und Magnetverschluss

Zur Verwendung im Kinderbett

Gurtbreite: 14 cm

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (mit integrierten Seitenbefestigungen)
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

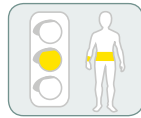

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5017
Pflegehilfsmittelnummer: 50.40.02.5017

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2221 - XS	132,20	09171387
2221/e - XS	132,20	09171393
2221/r - XS	146,80	09171401
2221/re - XS	146,80	09171418
2221/f - XS	166,50	-
2221/ef - XS	166,50	-
2221/rf - XS	185,75	-
2221/ref - XS	185,75	-


SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt

- Lagerungshilfe
- Keine Fixierung**

Befestigung am Bett mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt (mit integrierten Seitenbefestigungen)

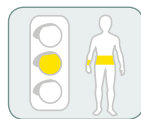

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2221/v - XS	132,20	-
2221/v - S	138,30	-
2221/v - M	138,30	-
2221/v - L	149,00	-
2221/ev - XS	132,20	-
2221/ev - S	138,30	-
2221/ev - M	138,30	-
2221/ev - L	149,00	-

Größentabelle Taillenumfang

XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust
 f = Flausch
 e = extra lange Betthalterung
 v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Handhalterung

Größe*	Umfang Handgelenk
XS	12 - 19 cm
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm

SEGUFIX®-Fußhalterung

Größe*	Umfang Fußgelenk
XS	17 - 25 cm
M	22 - 30 cm
L	27 - 33 cm

Hinweis:

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (lockere oder feste Fixierung) siehe SEGUFIX®-Handbuch!



SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt und Magnetverschluss


<u>2222 - XS bestehend aus:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	2221 - XS
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung	2203 - XS
1 SEGUFIX®-Handhalterung	2204 - XS
1 SEGUFIX®-Fußhalterung	2205 - XS

Ausführung XS nur für Kinderbetten

<u>2222 - M bestehend aus:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	2221 - M
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung	2203 - M
1 SEGUFIX®-Handhalterung	2204 - M
1 SEGUFIX®-Fußhalterung	2205 - M

<u>2222 - L bestehend aus:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	2221 - L
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung	2203 - L
1 SEGUFIX®-Handhalterung	2204 - L
1 SEGUFIX®-Fußhalterung	2205 - L

Enthalten sind insgesamt:
 11 SEGUFIX®-Schlösser
 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

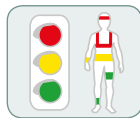

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2222 - XS	255,30	-
2222 - M	268,40	-
2222 - L	299,00	-
2222/e - XS	255,30	-
2222/e - M	268,40	-
2222/e - L	299,00	-
2222/r - XS	286,80	-
2222/r - M	302,10	-
2222/r - L	338,10	-
2222/re - XS	286,80	-
2222/re - M	302,10	-
2222/re - L	338,10	-

SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt, Art.-Nr. 2222

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung, Art.-Nr. 2211 (Seite 22)

SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung, Art.-Nr. 2212 (Seite 19)

Größentabelle Taillenumfang


XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss

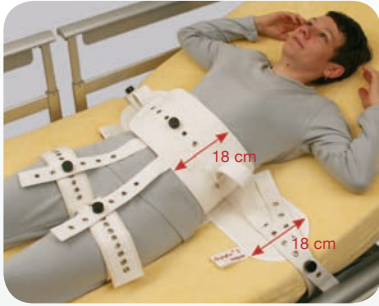

Fixiervariante mit
Art.-Nr. 2231 und 2203



Für schmale
Erwachsene

**SEGUFIX®-Oberschenkel-
manschetten**



Größe*	Umfang Oberschenkel
S	38 - 52 cm
M	50 - 72 cm
L	58 - 88 cm
XL	85 - 115 cm

**SEGUFIX®-Standard mit
Oberschenkelmanschetten
und Magnetverschluss**

Fixierung von Patienten und Lagerungs-
hilfe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (mit integrierten Seitenbefestigungen)
- 5 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

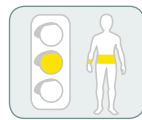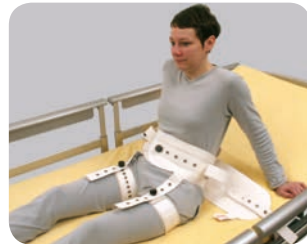

95°

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5018
Pflegehilfsmittelnummer: 50.40.02.5018


Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2231 - M	179,40	09171424
2231 - L	190,10	09171430
2231/e - M	179,40	09171447
2231/e - L	190,10	09171453
2231/r - M	195,10	09171476
2231/r - L	207,40	09171482
2231/r - XL	242,70	-
2231/re - M	195,10	09171499
2231/re - L	207,40	09171507
2231/re - XL	242,70	-
2231/f - M	214,30	-
2231/f - L	233,80	-
2231/ef - M	214,30	-
2231/ef - L	233,80	-
2231/rf - M	234,55	-
2231/rf - L	256,95	-
2231/rf - XL	317,20	-
2231/ref - M	234,55	-
2231/ref - L	256,95	-
2231/ref - XL	317,20	-

**SEGUFIX®-Standard mit
Oberschenkelmanschetten
und Magnetverschluss**

Fixierung von Patienten und Lagerungs-
hilfe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (mit integrierten Seitenbefestigungen)
- 5 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

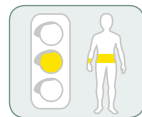

95°

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5018
Pflegehilfsmittelnummer: 50.40.02.5018

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2231 - S	179,40	09171513
2231/e - S	179,40	09171536
2231/r - S	195,10	09171542
2231/re - S	195,10	09171559
2231/f - S	214,30	-
2231/ef - S	214,30	-
2231/rf - S	234,55	-
2231/ref - S	234,55	-

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust
 f = Flausch
 e = extra lange Betthalterung
 v = Velcro® / Klettverschluss



Bauchgurt:
Größe S: 14 cm
Größe M/L: 18 cm

Bettgurt:
Größe S/M/L: 18 cm

**Hinweis Klettverschluss:

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.



SEGUFIX®-Oberschenkelmanschetten

Größe*	Umfang Oberschenkel
M	50 - 72 cm
L	58 - 88 cm

SEGUFIX®-Handhalterung

Größe*	Umfang Handgelenk
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm

SEGUFIX®-Fußhalterung


Größe*	Umfang Fußgelenk
M	22 - 30 cm
L	27 - 33 cm

SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten

- Lagerungshilfe
- Keine Fixierung**

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten (mit integrierten Seitenbefestigungen)

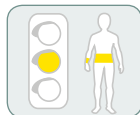


Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2231/v - S	179,40	-
2231/v - M	179,40	-
2231/v - L	190,10	-
2231/ev - S	179,40	-
2231/ev - M	179,40	-
2231/ev - L	190,10	-

SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Magnetverschluss

2232 - M bestehend aus:	Art.-Nr.
1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	2231 - M
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung	2203 - M
1 SEGUFIX®-Handhalterung	2204 - M
1 SEGUFIX®-Fußhalterung	2205 - M

2232 - L bestehend aus:	Art.-Nr.
1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	2231 - L
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung	2203 - L
1 SEGUFIX®-Handhalterung	2204 - L
1 SEGUFIX®-Fußhalterung	2205 - L

Enthalten sind insgesamt:
13 SEGUFIX®-Schlösser
2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

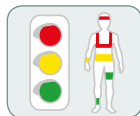

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2232 - M	309,50	-
2232 - L	340,10	-
2232/e - M	309,50	-
2232/e - L	340,10	-
2232/r - M	343,20	-
2232/r - L	379,20	-
2232/re - M	343,20	-
2232/re - L	379,20	-

Größentabelle Taillenumfang

XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
r = robust
f = Flausch
e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



Größe XS und S



Größe M und L



Hinweis:


Die SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung ist nicht für die Schulterhalterung Größe XS (Kinder) geeignet.

SEGUFIX®-Schulterhalterung mit Magnetverschluss

Verhindert das Herauswinden aus der SEGUFIX®-Standard nach oben

Anwendung:
SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten erforderlich

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schultergurt
2 SEGUFIX®-Schlösser
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

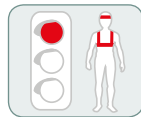

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5005
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5005

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2203- XS	42,10	09167776
2203 - S	45,50	09167842
2203 - M	45,50	09167782
2203 - L	48,60	09167799
2203/r - XS	46,70	09167807
2203/r - S	50,60	09167859
2203/r - M	50,60	09167813
2203/r - L	54,90	09167836

SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung mit Magnetverschluss für


- Schulterhalterung
- Akut-Fixierung-Schulter
- Tragengurt-Schulter

- Verhindert das Aufrichten des Oberkörpers
- Auf ständige Beobachtung ist zu achten

Anwendung:
SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten und SEGUFIX®-Schulterhalterung erforderlich

Gesamtlänge: 114 cm*

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Schulter-Zusatzgurte
2 SEGUFIX®-Schlösser
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

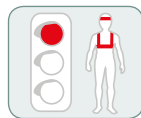

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5006
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5006

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2212	29,90	09167865
2212/r	34,50	09167871

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
r = robust
f = Flausch
e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Handhalterung

Größe*	Umfang Handgelenk
XS	12 - 19 cm
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm


SEGUFIX®-Handhalterung mit Magnetverschluss

- Flexible Fixierung einer oder beider Hände
- Verhindert Selbstverletzung/Verletzung anderer durch Patienten

Anwendung:
SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten erforderlich

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten
2 SEGUFIX®-Schlösser
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, Grad der Fixierung ist individuell einstellbar. Für weitere Informationen siehe SEGUFIX®-Handbuch.

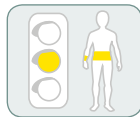

95°

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5007
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5007

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2204 - XS	29,90	09167888
2204 - M	30,90	09167894
2204 - L	37,00	09167902
2204/r - XS	34,50	09167919
2204/r - M	35,70	09167925
2204/r - L	42,80	09167931




SEGUFIX®-Handhalterung verlängert

Größe*	Umfang Handgelenk
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert mit Magnetverschluss

- Für die Anwendung ohne Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten
- Direkt am Krankenbett zu befestigen

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten, lang
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

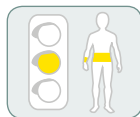

95°

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5008
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5008

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2224 - M	52,20	05025772
2224 - L	62,60	05025803
2224/r - M	60,00	05025832
2224/r - L	72,00	05025878



SEGUFIX®-Handhalterung verlängert mit Klettverschluss


Größe*	Umfang Handgelenk
M	16 - 24 cm

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert mit Klettverschluss

- Keine Fixierung**
- Für die Anwendung ohne Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten
- Direkt am Krankenbett zu befestigen

Befestigung am Bett mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten, lang

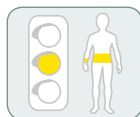

95°

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2224/v - M	39,50	05025890



SEGUFIX®-Fußhalterung

Größe*	Umfang Fußgelenk
XS	17 - 25 cm
M	22 - 30 cm
L	27 - 33 cm

SEGUFIX®-Fußhalterung mit Magnetverschluss


Lockere bis feste Fixierung eines oder beider Füße

Ausführung **XS** nur für **Kinderbetten**

Ausführung **e** und **re** mit verlängertem Verbindungsgurt für Betten ab einer Breite von über 1 m.

Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Fußmanschetten
- 1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

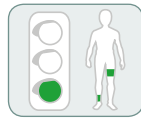

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5009
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5009

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2205 - XS	51,10	09168008
2205 - M	53,70	09168014
2205 - L	64,40	09168020
2205/e - XS	51,10	09168037
2205/e - M	53,70	09168043
2205/e - L	64,40	09168066
2205/r - XS	58,80	09168072
2205/r - M	61,80	09168089
2205/r - L	74,10	09168095
2205/re - XS	58,80	09168103
2205/re - M	61,80	09168126
2205/re - L	74,10	09168132



SEGUFIX®-Fußhalterung mit Klettverschluss

Größe*	Umfang Fußgelenk
XS	17 - 25 cm
M	22 - 30 cm

SEGUFIX®-Fußhalterung mit Klettverschluss

- Keine Fixierung**
- Lockere bis feste Fixierung/Lagerung eines oder beider Füße


Befestigung am Bett mit Schlaufenverschluss

Ausführung **XS** nur für **Kinderbetten**

Ausführung **ev** mit verlängertem Verbindungsgurt für Betten ab einer Breite von über 1 m.

Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Fußmanschetten
- 1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt

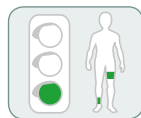

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2205/v - XS	51,10	09168149
2205/v - M	53,70	09168155
2205/ev - XS	51,10	09168161
2205/ev - M	53,70	09168178

****Hinweis Klettverschluss:**

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.

Größentabelle Taillenumfang

XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust
 f = Flausch
 e = extra lange Betthalterung
 v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung


Größe*	Umfang Oberschenkel
S	38 - 52 cm
M	50 - 72 cm
L	58 - 88 cm

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung mit Magnetverschluss

- Zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine
- Auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Oberschenkelgurt
- 4 SEGUFIX®-Schlösser ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

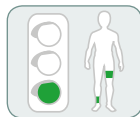

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5010
Pfleghilfsmittelnummer: 50.45.02.5010

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2211 - S	75,70	09168221
2211 - M	75,70	09168184
2211 - L	83,30	-
2211/e - S	75,70	09168238
2211/e - M	75,70	09168190
2211/e - L	83,30	-
2211/r - S	87,00	09168244
2211/r - M	87,00	09168209
2211/r - L	95,70	-
2211/re - S	87,00	09168250
2211/re - M	87,00	09168215
2211/re - L	95,70	-



SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung mit Klettverschluss

Größe*	Umfang Oberschenkel
M	50 - 72 cm
L	58 - 88 cm


SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung mit Klettverschluss

- Zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine
- Keine Fixierung**

Befestigung am Bett mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Oberschenkelgurt

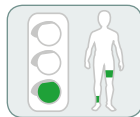

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2211/v - M	75,70	09168267
2211/v - L	83,30	-
2211/ev - M	75,70	09168273
2211/ev - L	83,30	-

**Hinweis Klettverschluss:

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.



Hinweis:

Zur zusätzlichen Bewegungseinschränkung kann der SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Art.-Nr. 3110/r, Seite 25) in Kombination mit der SEGUFIX®-Fußhalterung (Art.-Nr. 2205, Seite 21), der SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (Art.-Nr. 4215/r und 4235/r, Seite 26-27) oder der SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Art.-Nr. 2211, siehe oben) verwendet werden.

Größentabelle Taillenumfang

XS*	S*	M*	L*	XL*
Kinder im Kinderbett	Schmale Erwachsene/ Kinder im Erwachsenenbett	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss




SEGUFIX®-Kopfhalterung mit Magnet-/Klettverschluss

- Zur Positionierung und Lagerung des Kopfes
- Keine Fixierung**

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Bettgurt mit Stirngurt
- 1 SEGUFIX®-Kinnkurt
- 1 SEGUFIX®-Lagerungsgurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

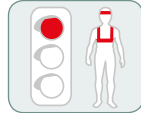

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2217	80,80	05036681
2217/e	80,80	05036698

Hinweis:

- Die SEGUFIX®-Kopfhalterung ist kein Mittel zur Patientenfixierung, sondern eine Lagerungshilfe.
- Die SEGUFIX®-Kopfhalterung dient der Stützung des Kopfes.
- Nur in Verbindung mit zusätzlichen Fixiermitteln benutzen, da es sonst zu Verletzungen im Bereich von Wirbelsäule, Hals und Nacken kommen kann.
- Bei Verwendung der SEGUFIX®-Kopfhalterung ist eine ständige Überwachung erforderlich, insbesondere weil willkürliche oder absichtliche Bewegungen zu Verletzungen im Bereich des Nackens oder der Wirbelsäule führen können.




SEGUFIX®-Kompakt mit Magnetverschluss

- Zur Fixierung von Patienten
- Verhindert ein Entkommen nach oben und unten bei voller Bewegungsfreiheit der Extremitäten

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Kompakt
- 7 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

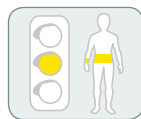


Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2250/r - S	252,00	05025921
2250/r - M	260,00	05025938
2250/r - L	276,00	05025944
2250/re - S	252,00	-
2250/re - M	260,00	-
2250/re - L	276,00	-

Hilfsmittelnummer: 19.40.02.5014
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.5014

SEGUFIX®-Kompakt:

- Volle Bewegungsfreiheit für Arme und Beine
- Keine Druckstellen im Genitalbereich durch Oberschenkelmanschetten
- Komfortable Polsterung
- Schnelles Öffnen in Notsituationen - nur 5 Verschlusspunkte
- Voll kompatibel mit weiteren Produkten des SEGUFIX®-Systems

Größentabelle Kompakt

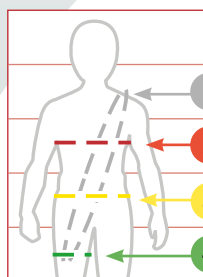	Umfang	S*	M*	L*
	1 Diagonaler Rumpf	134 - 154 cm	164 - 174 cm	194 - 204 cm
	2 Brust	48 - 88 cm	75 - 115 cm	103 - 143 cm
	3 Taille	52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm
	4 Oberschenkel	38 - 52 cm	50 - 72 cm	58 - 88 cm



Art.-Nr. 3240 - 3243



Art.-Nr. 3244

Hinweis:

Die SEGUFIX®-Verlängerungsgurte sind nicht für die Veränderung von Größen geeignet.

Ohne SEGUFIX®-Schloss und Magnetschlüssel



Art.-Nr. 3140 - 3143



Art.-Nr. 3144

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Magnetverschluss

Art.-Nr. 3240 und 3240/r: mit Sockeltasche
12 Ösen, 2 Metallschlaufen

Art.-Nr. 3241 und 3241/r: ohne Sockeltasche
12 Ösen, 2 Metallschlaufen

Art.-Nr. 3242 und 3242/r: mit Sockeltasche
12 Ösen, 1 Metallschleufe

Art.-Nr. 3243 und 3243/r: ohne Sockeltasche
12 Ösen, 1 Metallschleufe

Art.-Nr. 3244 und 3244/r: ohne Sockeltasche
24 Ösen, ohne Metallschleufe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0002
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0002

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
3240	17,70	09167204
3240/r	20,00	09167210
3241	15,40	09167227
3241/r	17,70	09167233
3242	16,40	09167256
3242/r	18,90	09167262
3243	14,10	09167279
3243/r	16,40	09167285
3244	16,10	09167291
3244/r	17,80	09167316

	3240/3140	3241/3141	3242/3142	3243/3143	3244/3144
Gesamtlänge*	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	120 cm
Metallschlaufen	2	2	1	1	0
12 Ösen	X	X	X	X	
24 Ösen					X
Sockeltasche	X		X		

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Ösen für Magnetverschluss

Art.-Nr. 3140 und 3140/r: mit Sockeltasche
12 Ösen, 2 Metallschlaufen

Art.-Nr. 3141 und 3141/r: ohne Sockeltasche
12 Ösen, 2 Metallschlaufen

Art.-Nr. 3142 und 3142/r: mit Sockeltasche
12 Ösen, 1 Metallschleufe

Art.-Nr. 3143 und 3143/r: ohne Sockeltasche
12 Ösen, 1 Metallschleufe

Art.-Nr. 3144 und 3144/r: ohne Sockeltasche
24 Ösen, ohne Metallschleufe

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt
ohne SEGUFIX®-Schloss
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel



Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0002
Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0002

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
3140	12,55	09170560
3140/r	14,85	09170577
3141	10,25	09170583
3141/r	12,55	09170608
3142	11,25	09170614
3142/r	13,75	09170620
3143	8,95	09170637
3143/r	11,25	09170643
3144	11,00	09170666
3144/r	12,70	09170672

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust	e = extra lange Betthalterung
f = Flausch	v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Verlängerungsgurt für Produkte mit Schnappverschluss

Verlängert Befestigungsgurte von SEGUFIX®-Sitzgurten mit Schnappverschluss für die Anbringung an breiteren Rückenlehnen

Geeignet für folgende SEGUFIX®-Gurte:

- Art.-Nr. 7240/v: SEGUFIX®-Sitzgurt mit Klettverschluss
- Art.-Nr. 7240: SEGUFIX®-Sitzgurt
- Art.-Nr. 7250: SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt
- Art.-Nr. 7260: SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten


Gesamtlänge: 80 cm*

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
3245	11,00	09170057

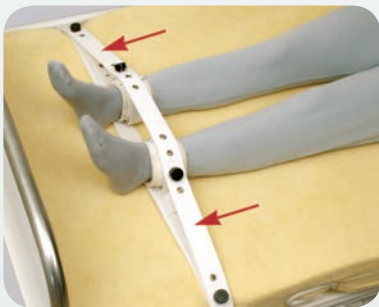

SEGUFIX®-Beinbügelgurt mit Ösen für Magnetverschluss


Zusätzliche Bewegungseinschränkung in Kombination mit der

- SEGUFIX®-Fußhalterung
- SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß
- SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung

Gesamtlänge: 124 cm*

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Beinbügelgurt ohne SEGUFIX®-Schloss ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

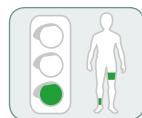

Hilfsmittelnummer: 19.99.99.0002
 Pflegehilfsmittelnummer: 50.99.99.0002

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
3110/r	14,20	09167322

Hinweis:

Zur zusätzlichen Bewegungseinschränkung kann der SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Art.-Nr. 3110/r) in Kombination mit der Fußhalterung (Art.-Nr. 2205, Seite 21), der Akut-Fixierung-Fuß (Art.-Nr. 4215/r und 4235/r, Seite 26-27) oder der Oberschenkelhalterung (Art.-Nr. 2211, Seite 22) verwendet werden.

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer r = robust e = extra lange Betthalterung
 f = Flausch v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter

Größe*	Umfang Brust
S	43 - 74 cm
M	74 - 114 cm
L	92 - 132 cm
XL	136 - 178 cm


SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter mit Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

Dieser Artikel darf nur in Verbindung mit der SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (Art.-Nr. 4214, 4234) und SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (Art.-Nr. 4215, 4235) benutzt werden.

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter
- 5 SEGUFIX®-Schlösser
ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

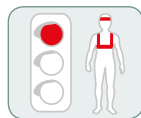

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4213/r - S	116,50	09168511
4213/r - M	116,50	09168385
4213/r - L	122,60	09168391
4213/r - XL	140,60	-
4213/re - S	116,50	09168528
4213/re - M	116,50	09168416
4213/re - L	122,60	09168422
4213/re - XL	140,60	-



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand


Größe*	Umfang Handgelenk
S	12 - 19 cm
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand mit Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

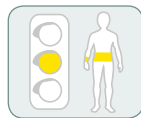

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4214/r - S	79,10	09168534
4214/r - M	79,10	09168439
4214/r - L	94,90	09168445
4214/re - S	79,10	09168540
4214/re - M	79,10	09168451
4214/re - L	94,90	09168468



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß


Größe*	Umfang Fußgelenk
S	17 - 25 cm
M	22 - 30 cm
L	27 - 33 cm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß mit Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

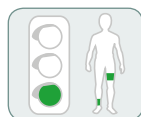

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4215/r - S	79,10	09168557
4215/r - M	79,10	09168474
4215/r - L	94,90	09168480
4215/re - S	79,10	09168563
4215/re - M	79,10	09168497
4215/re - L	94,90	09168505

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter


Größe*	Umfang Brust
S	43 - 74 cm
M	74 - 114 cm
L	92 - 132 cm
XL	136 - 178 cm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter mit Dreh-Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

Dieser Artikel darf nur in Verbindung mit der SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (Art.-Nr. 4234, 4214) und SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (Art.-Nr. 4235, 4215) benutzt werden.

- Bestehend aus:
- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter
 - 5 SEGUFIX®-Dreh-Schlösser ohne SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel

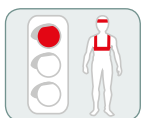

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4233/r - S	142,50	-
4233/r - M	142,50	-
4233/r - L	148,60	-
4233/r - XL	166,60	-
4233/re - S	142,50	-
4233/re - M	142,50	-
4233/re - L	148,60	-
4233/re - XL	166,60	-




SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand

Größe*	Umfang Handgelenk
S	12 - 19 cm
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand mit Dreh-Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

- Bestehend aus:
- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand
 - 4 SEGUFIX®-Dreh-Schlösser
 - 1 SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel

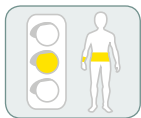

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4234/r - S	102,30	-
4234/r - M	102,30	-
4234/r - L	118,10	-
4234/re - S	102,30	-
4234/re - M	102,30	-
4234/re - L	118,10	-




SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß

Größe*	Umfang Fußgelenk
S	17 - 25 cm
M	22 - 30 cm
L	27 - 33 cm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß mit Dreh-Magnetverschluss

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen

- Bestehend aus:
- 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß
 - 4 SEGUFIX®-Dreh-Schlösser
 - 1 SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel

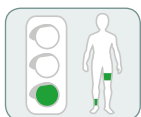

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
4235/r - S	102,30	-
4235/r - M	102,30	-
4235/r - L	118,10	-
4235/re - S	102,30	-
4235/re - M	102,30	-
4235/re - L	118,10	-



Optional für das SEGUFIX®-Akut-System:

- SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung (Seite 19)
- SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Seite 22)
- SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Seite 25)

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter

Größe*	Umfang Brust
S	43 - 74 cm
M	74 - 114 cm
L	92 - 132 cm

SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter mit Magnet-/Schlaufenverschluss

- Fixierung von Patienten auf Tragen und Liegen
- Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet


Darf nur in Verbindung mit der SEGUFIX®-Handhalterung verlängert (Art.-Nr. 2224) und dem SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß (Art.-Nr. 5245) benutzt werden.

Tragenbreite: 40 cm bis max. 80 cm

Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

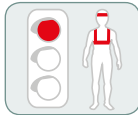

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
5243 - S	95,00	-
5243 - M	95,00	09170100
5243 - L	100,20	09170117



SEGUFIX®-Handhalterung verlängert mit Klettverschluss

Größe*	Umfang Handgelenk
M	16 - 24 cm

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert mit Klettverschluss


- Keine Fixierung**
- Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet

Tragenbreite: 40 cm bis max. 80 cm

Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten, lang

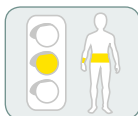

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
2224/v - M	39,50	05025890



SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß

Größe*	Umfang Fußgelenk
M	22 - 30 cm

SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß mit Magnet-/Schlaufenverschluss


- Fixierung von Patienten auf Tragen und Liegen
- Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet

Tragenbreite: 40 cm bis max. 80 cm

Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß
- 2 SEGUFIX®-Schlösser ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

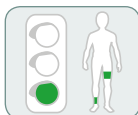



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
5245 - M	78,20	09170123



SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß mit Klettverschluss

Größe*	Umfang Fußgelenk
M	22 - 30 cm

SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß mit Klettverschluss - Keine Fixierung** - Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet Tragenbreite: 40 cm bis max. 80 cm Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
	5245/v - M	65,30	09170146

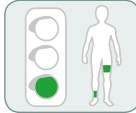

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Komplett:

- SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter, Art.-Nr. 5243
- SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß, Art.-Nr. 5245/v - M
- SEGUFIX®-Handhalterung verlängert, Art.-Nr. 2224/v - M

****Hinweis Klettverschluss:**
 Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.



Das SEGUFIX®-Handbuch ist eine Zusammenstellung der einzelnen Gebrauchsanweisungen der SEGUFIX®-Produkte. Jeder Handgriff wird anschaulich und ausführlich erklärt.
 Art.-Nr. 8019/D € 3,50



Der SEGUFIX®-Lehrfilm auf DVD zeigt die korrekte Anwendung der SEGUFIX®-Produkte.
 Art.-Nr. 8018/D € 19,80

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust e = extra lange Betthalterung
 f = Flausch v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Fixierhilfe

Gurtlänge*	in ca. Maßen
Gesamtlänge	205 cm
Breiter Gurt	59 cm
Schmaler Gurt (je Seite)	73 cm



SEGUFIX®-Fixierhilfe mit Schlaufenverschluss

Gurtlänge*	in ca. Maßen
Gesamtlänge	245 cm
Breiter Gurt	59 cm
Schmaler Gurt (je Seite)	93 cm



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
5218	35,80	05111218

SEGUFIX®-Fixierhilfe mit Magnetverschluss

- Hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- Zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- Kann auch über den Knien angebracht werden
- Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Fixierhilfe
- 2 SEGUFIX®-Schlösser ohne SEGUFIX®-Magnetschlüssel

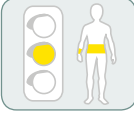Art.-Nr.	Preis/€	PZN
5218/v	35,80	-



SEGUFIX®-Fixierhilfe mit Schlaufenverschluss

- Hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- Zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- Kann auch über den Knien angebracht werden
- Auch für den Rettungsdienstbereich geeignet

Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Fixierhilfe

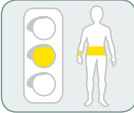
*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



Festes Anbringen
der Handmanschetten
am Fixiergürtel (vor dem Bauch)



Lockeres Anbringen
der Handmanschetten
am Fixiergürtel (vor dem Bauch)

SEGUFIX®-Handfixiergürtel mit Magnetverschluss

Zur Fixierung der Hände beim Transport

Bei angelegtem Handfixiergürtel ist eine ununterbrochene Überwachung erforderlich, da der Patient z. B. einen Sturz nicht abfangen kann.

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Fixiergürtel
- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
5204/r - XS	166,10	-
5204/r - M	176,80	-
5204/r - L	195,00	-
5204/r - XL	253,40	-



Festes Anbringen
(hinter dem Rücken)



Lockeres Anbringen
(hinter dem Rücken)

SEGUFIX®-Handmanschetten

Größe*	Umfang Handgelenk
XS	12 - 19 cm
M	16 - 24 cm
L	22 - 29 cm
XL	26 - 36 cm

Größentabelle Handfixiergürtel Taillenumfang

XS*	M*	L*	XL*
Schmale Erwachsene und Kinder	Erwachsene	Korpulente	Übergröße
52 - 82 cm	80 - 120 cm	116 - 156 cm	140 - 180 cm



Art.-Nr. 5204/r



Art.-Nr. 5204/r,
6230/v und 6216/v

Anwendung:

Verhindert Selbstverletzung oder Verletzung anderer durch den Patienten, z. B. begleitender Personen beim Transport.

Achtung:

In Automobilen ersetzt das SEGUFIX®-Transportgurt-System nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt- und Beckengurt). Das Transportgurt-System und die SEGUFIX®-Mobile-Fixierung darf nur als zusätzliche Stützung oder Sicherung des Patienten angebracht werden.

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett

Größe*	Taillenumfang
S	52 - 82 cm
M	80 - 120 cm
L	116 - 156 cm

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport mit Klettverschluss

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten

Anwendung:
SEGUFIX®-Rückenlehngurt erforderlich
(Art.-Nr. 6230/v)
SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf
(Art.-Nr. 6220)

Klettverschluss muss mind. 25 cm überlappen
Gurtbreite: 14 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport 

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6210/v - S	34,80	09169580
6210/v - M	37,80	09169597
6210/v - L	40,90	09169605



SEGUFIX®-Leibgurt-Transport

Größe*	Taillenumfang
S	52 - 82 cm
M	80 - 120 cm
L	116 - 156 cm

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport mit Klett-/Magnetverschluss

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten

Anwendung:
SEGUFIX®-Rückenlehngurt erforderlich
(Art.-Nr. 6230/v)
SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf
(Art.-Nr. 6220)

Gurtbreite: 14 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel 

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6216/v - S	45,60	09169611
6216/v - M	48,70	09169628
6216/v - L	51,80	09169634



SEGUFIX®-Rückenlehngurt

Größe*	Umfang Rückenlehne
S	78 - 103 cm
M	98 - 123 cm
L	118 - 143 cm
XL	142 - 168 cm

SEGUFIX®-Rückenlehngurt mit Klettverschluss

Zum Anbringen des SEGUFIX®-Leibgurtes-Transport (Art.-Nr. 6210/v oder 6216/v) und SEGUFIX®-Hosenträgergurtes (Art.-Nr. 6220) benötigt wird

Nicht anzuwenden bei instabiler Rückenlehne.
Nur mit Rollstühlen oder anderen geeigneten Sitzgelegenheiten mit **fester Rückenlehne und Spalt** zwischen Sitz und Rückenlehne zu verwenden.

Klettverschluss muss mind. 25 cm überlappen
Gurtbreite: 18 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückenlehngurt 

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6230/v - S	34,80	09169663
6230/v - M	37,80	09169686
6230/v - L	40,90	09169692
6230/v - XL	44,00	09169700



Art.-Nr. 6116/v, 6230/v



Art.-Nr. 6210/v, 6230/v

Anwendung:

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen, Automobilen und anderen Sitzgelegenheiten.

Achtung:

In Automobilen ersetzt das SEGUFIX®-Transport-System nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt- und Beckengurt). Das Transport-System darf nur als zusätzliche Stützung oder Sicherung des Patienten angebracht werden.




Hinweis:
Patienten über eine Größe von 140 cm benötigen Größe M.

SEGUFIX®-Hosenträgergurt mit Schnappverschluss

- Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Unterstützt die aufrechte Sitzhaltung und verhindert das Nach-Vorn-Rutschen des Patienten

Anwendung:
SEGUFIX®-Rückenlehngurt (Art.-Nr. 6230/v) und SEGUFIX®-Leibgurt-Transport (Art.-Nr. 6210/v oder 6216/v) erforderlich

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Hosenträgergurt 
Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6220 - S	63,90	09169640
6220 - M	70,00	09169657



Rückansicht

SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Magnetverschluss

- Zur Stützung des sitzenden Patienten
- Stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig ein Abrutschen von der Sitzfläche

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Magnetverschluss:

Art.-Nr. 6240 bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

Art.-Nr. 6244 bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt
1 SEGUFIX®-Schrittpolster
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel 

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906


Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6240 - S	128,90	09169893
6240 - M	135,90	09169901
6240 - L	139,80	09169918
6244 - S	158,40	-
6244 - M	165,40	-
6244 - L	169,30	-

Größentabelle Rückhaltegurt

Größe*	a) Umfang Leibgurt	b) Verbindungsstück	c) Schulterkranz
S	90 - 130 cm	10 cm	80 cm
M	90 - 130 cm	15 cm	80 cm
L	122 - 162 cm	15 cm	95 cm

- a) Gesamtumfang von Patient und Rückenlehne in Taillenhöhe.
- b) Verbindungsstück zwischen Leibgurt und Schulterkranz.
- c) Innerer Umfang des Schulterkranzes.

Alle Maße werden beim sitzenden Patienten genommen.

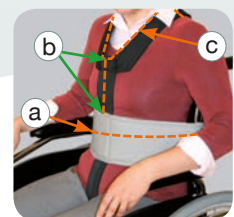

Auf Anfrage andere Maße möglich.



SEGUFIX®-Schrittpolster für den Rückhaltegurt

Dient der Polsterung im Schrittbereich

Anwendung:
Nur kompatibel mit dem SEGUFIX®-Rückhaltegurt (Art.-Nr. 6240 und 6244).

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schrittpolster 

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6040	29,50	05111247

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust
 f = Flausch
 e = extra lange Betthalterung
 v = Velcro® / Klettverschluss

Verschluss-Systeme Art.-Nr. 1106 - 1215
 Bandagen-System Art.-Nr. 2203 - 2250
 Zusatz-Gurte Art.-Nr. 3110 - 3245
 Akut-System Art.-Nr. 4213 - 4235
 Mobile-Fixierung Art.-Nr. 5204 - 5245
 Transport-System Art.-Nr. 6040 - 6276
 Sitzgurt-System Art.-Nr. 7240 - 7280
 Zubehör / Einzelteile Art.-Nr. 8010 - 8022



SEGUFIX®-Multigurt mit Klettverschluss

- Haltegurt für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen

Klettverschluss muss mind. 25 cm überlappen
Gurtbreite: 14 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Multigurt



Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6250/v - XS	41,70	09169717
6250/v - S	41,70	09169723
6250/v - M	49,90	09169746
6250/v - L	49,90	09169752



SEGUFIX®-Multigurt mit Klett-/Magnetverschluss

- Haltegurt für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen (ohne Schloss)

Gurtbreite: 14 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Multigurt
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
6256/v - XS	53,20	09169769
6256/v - S	53,20	09169775
6256/v - M	61,40	09169781
6256/v - L	61,40	09169798



SEGUFIX®-Multigurt

Größe*	Gesamt-länge	Umfang** - bei Sicherung mit Klettverschluss (Art.-Nr. 6250/v)	Umfang** - bei Sicherung mit Magnetverschluss (Art.-Nr. 6256/v)
XS	160 cm	100 - 135 cm	110 - 150 cm
S	180 cm	120 - 155 cm	130 - 170 cm
M	200 cm	135 - 175 cm	150 - 190 cm
L	240 cm	175 - 215 cm	190 - 230 cm

**Umfang: kompletter Umfang, Patient inklusive Rückenlehne



SEGUFIX®-Schutzbezug

Art.-Nr. 8013 / € 9,90
siehe Seite 41!

(Abb. Art.-Nr. 8013 und 6250/v)

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Beckengurt mit Schnappverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
Haltegurt für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle) Graues Beckengurtpolster: 74 cm* lang Gurtbreite: 14 cm* Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Beckengurt	6260	43,50	09169806
Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906			



SEGUFIX®-Beckengurt mit Magnetverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
Haltegurt für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle) Graues Beckengurtpolster: 74 cm* lang Gurtbreite: 14 cm* Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Beckengurt 2 SEGUFIX®-Schlösser 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel	6266	60,30	09169812
Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906			



SEGUFIX®-Beckenhosengurt mit Magnetverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
- Haltegurt für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle) - Verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche Graues Beckengurtpolster: 74 cm* lang Gurtbreite: 14 cm* Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Beckenhosengurt 1 SEGUFIX®-Schloss 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel	6276	68,70	-
Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906			



Die Anti-Rutsch-Auflage verhindert ein Abrutschen von der Sitzfläche. Sie lässt sich nur in Pfeilrichtung verschieben, kein „Abrutschen“ von der Sitzfläche mehr!
 Waschbar bis max. 80°C.
 Art.-Nr. 8017 / € 66,15

Der SEGUFIX®-Schutzbezug schützt SEGUFIX®-Transportgurte vor Verschmutzungen da bakterienrichtig. Waschbar bis zu 95°C und dampfsterilisierbar.
 Art.-Nr. 8013 / € 9,90



Mehr Informationen siehe Seite 41!



Belastbarkeit des Schnappverschlusses bis max. 70 kg



SEGUFIX®-Sitzgurt mit Klettverschluss

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten

Klettverschluss muss mind. 25 cm überlappen
Rückenlehnen-Umfang: 70 - 150 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt



(Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss, Art.-Nr. 3245, siehe Zusatz-Gurte Seite 25)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7240/v - S	74,70	09169953
7240/v - M	80,90	09169976
7240/v - L	91,60	09169982



Alle Sitzgurte auch mit Flausch erhältlich!



SEGUFIX®-Sitzgurt mit Magnetverschluss

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 150 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss, Art.-Nr. 3245, siehe Zusatz-Gurte Seite 25)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7240 - S	77,70	09169999
7240 - M	83,90	09170005
7240 - L	94,60	09170011

7240/f - S	112,00	-
7240/f - M	118,80	-
7240/f - L	138,30	-



SEGUFIX®-Sitzgurt mit Magnetverschluss

Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 115 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Magnetverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Magnetverschluss, Art.-Nr. 3244, siehe Zusatz-Gurte Seite 24)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7246 - S	95,80	09170028
7246 - M	102,90	09170034
7246 - L	115,20	09170040

7246/f - S	130,10	-
7246/f - M	137,80	-
7246/f - L	158,90	-

SEGUFIX®-Sitzgurt

Größe*	Umfang Taille
S	52 - 82 cm
M	80 - 120 cm
L	116 - 156 cm

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



Belastbarkeit des Schnappverschlusses bis max. 70 kg

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt und Magnetverschluss

- Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 150 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss, Art.-Nr. 3245, siehe Zusatz-Gurte Seite 25)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7250 - S	112,30	09169835
7250 - M	118,50	09169841
7250 - L	129,20	09169858
7250/f - S	146,60	-
7250/f - M	153,40	-
7250/f - L	172,90	-



SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt und Magnetverschluss

- Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 115 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Magnetverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Magnetverschluss, Art.-Nr. 3244, siehe Zusatz-Gurte Seite 24)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7256 - S	130,40	09169864
7256 - M	137,50	09169870
7256 - L	149,80	09169887
7256/f - S	164,70	-
7256/f - M	172,40	-
7256/f - L	193,50	-

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

Größe*	Umfang Taille
S	52 - 82 cm
M	80 - 120 cm
L	116 - 156 cm



Art.-Nr. 3244

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Magnetverschluss
siehe Seite 24!



Art.-Nr. 3245

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt für Produkte mit Schnappverschluss
siehe Seite 25!

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
r = robust
f = Flausch
e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



Belastbarkeit des Schnappverschlusses bis max. 70 kg



Alle Sitzgurte auch mit Flausch erhältlich!

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten

Größe*	Umfang Taille
S	52 - 82 cm
M	80 - 120 cm
L	116 - 156 cm

Größe*	Umfang Oberschenkel
S	38 - 52 cm
M	50 - 72 cm
L	58 - 88 cm

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten und Magnetverschluss

- Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 150 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten
- 3 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss, Art.-Nr. 3245, siehe Zusatz-Gurte Seite 25)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7260 - S	149,50	09170399
7260 - M	159,40	09170407
7260 - L	170,30	09170413
7260/f - S	183,80	-
7260/f - M	194,30	-
7260/f - L	214,00	-

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten und Magnetverschluss

- Zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- Verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche

Rückenlehnen-Umfang: 70 - 115 cm*
Gurtbreite: 14 cm*

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Magnetverschluss:

Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten
- 4 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



(Verlängerungsgurt mit Magnetverschluss, Art.-Nr. 3244, siehe Zusatz-Gurte Seite 24)

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0906

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
7266 - S	166,90	09170436
7266 - M	176,80	09170442
7266 - L	187,70	09170459
7266/f - S	201,20	-
7266/f - M	211,70	-
7266/f - L	231,40	-



*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Handmanschette Klett

Umfang Handgelenk
16 - 24 cm*

SEGUFIX®-Handmanschette Transport mit Klettverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
- Zur Positionierung der Hände an Armlehnen von Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten - Keine Fixierung** Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Handmanschette Transport (für eine Hand)	7270/v	14,80	09170063
95°			



SEGUFIX®-Fußhalterung Klett

Umfang Fußgelenk
22 - 30 cm*

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport mit Klettverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
- Zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten - Keine Fixierung** Befestigung am Rollstuhl mit Schlaufenverschluss Umfang: 80 - 100 cm* Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (für beide Füße)	7280/v	38,30	09170086
95°			



SEGUFIX®-Fußhalterung

Umfang Fußgelenk
22 - 30 cm*

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport mit Magnetverschluss	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
Zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten Befestigung am Rollstuhl mit Magnetverschluss Umfang: 68 - 112 cm* Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (für beide Füße) 3 SEGUFIX®-Schlösser 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel	7280	38,30	-
95°			

****Hinweis Klettverschluss:**

Aus juristischer Sicht gilt das Produkt als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig aus dem Klettverschluss befreien kann.

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer r = robust e = extra lange Betthalterung
 f = Flausch v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Schaffell-Einlagen für SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten
Art.-Nr. 2221 und Art.-Nr. 2121
Art.-Nr. 2231 und Art.-Nr. 2131

- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- Schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8012 - XS/S	42,90	09170293
8012 - M	57,90	09170301
8012 - L	61,90	09170318
(Siehe Größentabelle Seite 10)		



SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage mit Kappe

- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- Schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 40 x 100 cm*



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8011	91,60	09170324



SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage

- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend zu jeder Jahreszeit
- Schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 90 x 180 cm*



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8010	256,60	09170330

Wissenswertes über medizinische Schaffelle

Naturfelle sind hautfreundlich, da sie aus einer ähnlichen Grundsubstanz wie die menschliche Haut bestehen. Sie helfen bei empfindlicher und entzündeter Haut.

Ärzte empfehlen Naturfelle besonders bei Wundliegen, Allergien, Nervenschmerzen, Nervosität, Kreislaufstörungen, Rheuma, Ischias, Rückenschmerzen und Gliederschmerzen.

Weitere positive Eigenschaften von Naturfellen:

- Sofortige Aufnahme von Transpirationsfeuchtigkeit und siebenmal schnellere Abgabe an die Luft als Synthetik. Körpergifte, die mit dem Schweiß ausgeschieden werden, werden abgebaut.
- Als Naturprodukte haben sie eine selbstreinigende Wirkung.
- Naturfell verfügt über „Eigenwärme“ und fühlt sich nie kalt an, die natürliche Atmung der Haut ist gewährleistet.
- Temperaturnausgleichend, daher für Sommer und Winter geeignet.
- Keine statische Aufladung.

Pflegeanleitung für medizinische Schaffelle

Waschmaschine:

- Waschtemperatur 30 - 40°C, nicht schleudern.
- Wollwaschmittel verwenden.

Handwäsche:

- In handwarmem Wasser (30 - 40°C) mit Wollwaschmittel zügig durchwaschen.
- In klarem, handwarmem Wasser durchspülen und ausschleudern.

Trocknen der Schaffelle:

- Zum Trocknen in den Wäschetrockner oder einfach an einer luftigen Stelle aufhängen.
Vorsicht: Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Bevor das Fell vollständig trocken ist, dieses etwas in Form ziehen und wenn nötig, das Fell mit einer Stahlbürste leicht durchbürsten.

Hinweis:

Bitte unbedingt beachten, dass das Fell nicht zu lange im Wasser ist (nicht einweichen).

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Aufrichter

Zur ergonomischen und wirbelsäulenschonenden Aufrichtung des Oberkörpers

Gesamtlänge: 160 cm*

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Aufrichter



Hilfsmittelnummer: 19.40.02.3007
Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.02.3007

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8016	21,00	09168296



SEGUFIX®-Schutzbezug

Der SEGUFIX®-Schutzbezug schützt folgende SEGUFIX®-Transportgurte vor Verschmutzungen:

- SEGUFIX®-Multigurt, Art.-Nr. 6250/v
- SEGUFIX®-Multigurt, Art.-Nr. 6256/v
- SEGUFIX®-Multigurt, Art.-Nr. 6156/v

(das SEGUFIX®-Schloss kann mit dem Schutzbezug nicht angewendet werden)

- SEGUFIX®-Beckengurt, Art.-Nr. 6260
- SEGUFIX®-Beckengurt, Art.-Nr. 6266
- SEGUFIX®-Beckengurt, Art.-Nr. 6166

Der SEGUFIX®-Schutzbezug ist bis zu 95°C waschbar und dampfsterilisierbar.

Er ist bakteriendicht.

Material: Der Träger besteht zu 100% aus Polyester, die Beschichtung aus 100% Polyurethan.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schutzbezug



Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8013	9,90	09169829



SEGUFIX®-Beckengurt (Art.-Nr. 6266) mit Schutzbezug (Art.-Nr. 8013)



Anti-Rutsch-Auflage

- Wurde entwickelt, um dem Herunterrutschen von der Sitzfläche vorzubeugen
- Eignet sich hervorragend für den Einsatz auf: Stühlen, Pflegestühlen, Rollstühlen, Betten, Bürostühlen usw.
- Lässt sich nur in Pfeilrichtung verschieben, kein „Abrutschen“ mehr!
- Nicht für unruhige Patienten geeignet
- In nassem Zustand funktioniert die Anti-Rutsch-Auflage nicht

Maximale Belastung: 250 kg

Größe: 37 x 43 cm*

Bestehend aus:
1 Anti-Rutsch-Auflage



Hilfsmittelnummer: 22.29.01.2017

Art.-Nr.	Preis/€	PZN
8017	66,15	09170092

Hinweis:

- Waschbar bis maximal 80°C
- Keinen Weichspüler oder Chlor verwenden
- Trockner geeignet (Anfangstemperatur 80°C, Schlusstemperatur 60°C)
- Kann nicht desinfiziert werden
- Muss nach dem Waschen vollständig trocken sein, um die Funktion zu gewährleisten

*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer
 r = robust
 f = Flausch
 e = extra lange Betthalterung
 v = Velcro® / Klettverschluss



SEGUFIX®-Transport-Tasche	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
<ul style="list-style-type: none"> - Bietet Platz für mehrere SEGUFIX®-Systeme zur Aufbewahrung auf den einzelnen Stationen - Schützt SEGUFIX®-Produkte - Separate Fächer an beiden Seiten - Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriffe - Praktisch für den Transport, z. B. für Schulungszwecke - Größe: ca. 62 cm x 32 cm x 28 cm - Farbe: schwarz (weißer SEGUFIX®-Schriftzug) <p>Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Transport-Tasche</p>	8014	29,80	09170821



SEGUFIX®-Bereitschaftstasche	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
<ul style="list-style-type: none"> - Griffbereit auf einen Blick für den schnellen Einsatz - Schützt SEGUFIX®-Produkte - Übersichtliche Aufbewahrung wichtiger SEGUFIX®-Produkte, z. B. ein SEGUFIX®-Komplett-System, ein Akut-System usw. - Platzsparende Lagerung, mehrere Taschen können übersichtlich gestapelt werden - Fächer: für SEGUFIX®-Handbuch/Gebrauchsanweisung, zusätzliche SEGUFIX®-Schlösser und Schlüssel usw. - Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriff - Tasche gepolstert - Größe: ca. 42 cm x 26 cm x 10 cm - Farbe: rot / schwarz, (weißer SEGUFIX®-Schriftzug) <p>Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Bereitschaftstasche (ohne Inhalt)</p>	8015	28,60	-



SEGUFIX®-Handbuch	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
<p>Gebrauchsanweisungen der SEGUFIX®-Produkte, jeder Handgriff wird anschaulich und ausführlich erklärt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Größe: DIN A5 - Schwarz-weiße Abbildungen <p>Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Handbuch</p>	8019/D	3,50	-



SEGUFIX®-Wäschenetz	Art.-Nr.	Preis/€	PZN
<p>Schont das Gurtmaterial beim Waschvorgang</p> <p>Größe: 60 x 40 cm*</p> <p>Bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Wäschenetz mit integriertem Verschluss</p>	8022	9,80	-




*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer


r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss

SEGUFIX®-Verschluss-Systeme (siehe Seite 12 - 13)

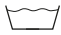Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
1106	SEGUFIX®-Knopf, schwarz	4,60	—	09169545	19.99.99.0999	50.99.99.0999
1117	SEGUFIX®-Metallsockel	1,90	—	09169551	19.99.99.0999	50.99.99.0999
1110	SEGUFIX®-Dreh-Knopf, grün	6,40	—	09169568	19.99.99.0999	50.99.99.0999
1111	SEGUFIX®-Vierkantsockel	5,20	—	09169574	19.99.99.0999	50.99.99.0999
1113	Steckknopf	17,90	—	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
1114	Stecksockel	1,90	—	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999

SEGUFIX®-Bandagen-System (siehe Seite 14 - 23)

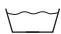Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
2005 - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt	14,00	95°C	09169060	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005 - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt	15,10	95°C	09169077	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005 - L	SEGUFIX®-Verbindungsgurt	15,10	95°C	09169083	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/e - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, extra lang	14,00	95°C	09169108	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/e - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, extra lang	15,10	95°C	09169114	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/e - L	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, extra lang	15,10	95°C	09169120	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/r - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust	16,10	95°C	09169137	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/r - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust	16,80	95°C	09169143	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/r - L	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust	16,80	95°C	09169166	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/re - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust, extra lang	16,10	95°C	09169172	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/re - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust, extra lang	16,80	95°C	09169189	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/re - L	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, robust, extra lang	16,80	95°C	09169195	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2005/v - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, Klett	14,00	95°C	09169203	—	—
2005/v - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, Klett	15,10	95°C	09169226	—	—
2005/ev - XS	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, Klett, extra lang	14,00	95°C	09169232	—	—
2005/ev - M	SEGUFIX®-Verbindungsgurt, Klett, extra lang	15,10	95°C	09169249	—	—
2103 - XS	SEGUFIX®-Schultergurt	30,60	95°C	09168758	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103 - S	SEGUFIX®-Schultergurt	34,00	95°C	09168818	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103 - M	SEGUFIX®-Schultergurt	34,00	95°C	09168764	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103 - L	SEGUFIX®-Schultergurt	37,10	95°C	09168770	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103/r - XS	SEGUFIX®-Schultergurt, robust	35,20	95°C	09168787	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103/r - S	SEGUFIX®-Schultergurt, robust	39,10	95°C	09168824	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103/r - M	SEGUFIX®-Schultergurt, robust	39,10	95°C	09168793	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2103/r - L	SEGUFIX®-Schultergurt, robust	43,40	95°C	09168801	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104 - XS	SEGUFIX®-Handmanschette	11,00	95°C	09168853	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104 - M	SEGUFIX®-Handmanschette	12,00	95°C	09168876	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104 - L	SEGUFIX®-Handmanschette	14,40	95°C	09168882	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104/r - XS	SEGUFIX®-Handmanschette, robust	12,70	95°C	09168899	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104/r - M	SEGUFIX®-Handmanschette, robust	13,80	95°C	09168907	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2104/r - L	SEGUFIX®-Handmanschette, robust	16,50	95°C	09168913	19.99.99.0999	50.99.99.0999

Verschluss-Systeme
Art.-Nr. 1106 - 1215

Bandagen-System
Art.-Nr. 2203 - 2250

Zusatz-Gurte
Art.-Nr. 3110 - 3245

Akut-System
Art.-Nr. 4213 - 4235


Mobile-Fixierung
Art.-Nr. 5204 - 5245

Transport-System
Art.-Nr. 6040 - 6276

Sitzgurt-System
Art.-Nr. 7240 - 7280

Zubehör / Einzelteile
Art.-Nr. 8010 - 8022

SEGUFIX® - Bandagen-System (siehe Seite 14 - 23)

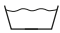Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
2105 - XS	SEGUFIX®-Fußmanschette	15,30	95°C	09168988	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105 - M	SEGUFIX®-Fußmanschette	16,60	95°C	09168994	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105 - L	SEGUFIX®-Fußmanschette	22,00	95°C	09169002	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105/r - XS	SEGUFIX®-Fußmanschette, robust	19,20	95°C	09169019	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105/r - M	SEGUFIX®-Fußmanschette, robust	20,70	95°C	09169025	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105/r - L	SEGUFIX®-Fußmanschette, robust	26,80	95°C	09169031	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2105/v - XS	SEGUFIX®-Fußmanschette, Klett	21,10	95°C	09169048	—	—
2105/v - M	SEGUFIX®-Fußmanschette, Klett	22,10	95°C	09169054	—	—
2111 - S	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt	62,80	95°C	09169290	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111 - M	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt	62,80	95°C	09169255	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111 - L	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt	69,10	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/e - S	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, extra lang	62,80	95°C	09169309	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/e - M	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, extra lang	62,80	95°C	09169261	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/e - L	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, extra lang	69,10	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/r - S	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust	74,10	95°C	09169315	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/r - M	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust	74,10	95°C	09169278	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/r - L	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust	81,50	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/re - S	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust, extra lang	74,10	95°C	09169321	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/re - M	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust, extra lang	74,10	95°C	09169284	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2111/re - L	SEGUFIX®-Oberschenkelgurt, robust, extra lang	81,50	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2112	SEGUFIX®-Schulter-Zusatzgurt	19,70	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2112/r	SEGUFIX®-Schulter-Zusatzgurt, robust	24,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2117	SEGUFIX®-Kopfhaltung	70,60	95°C	05036623	—	—
2117/e	SEGUFIX®-Kopfhaltung, extra lang	70,60	95°C	05036652	—	—
2121 - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	110,40	95°C	09171708	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121 - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	116,50	95°C	09171654	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121 - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	116,50	95°C	09171571	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121 - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt	127,20	95°C	09171588	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/e - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, extra lang	110,40	95°C	09171714	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/e - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, extra lang	116,50	95°C	09171660	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/e - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, extra lang	116,50	95°C	09171594	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/e - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, extra lang	127,20	95°C	09171602	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/r - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust	125,00	95°C	09171720	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/r - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust	132,00	95°C	09171677	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/r - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust	132,00	95°C	09171619	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/r - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust	144,50	95°C	09171625	19.99.99.0999	50.99.99.099
2121/r - XL	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust	172,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.099


*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer

r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthaltung
v = Velcro® / Klettverschluss

SEGUFIX®-Bandagen-System (siehe Seite 14 - 23)

Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
2121/re - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust, extra lang	125,00	95°C	09171737	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/re - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust, extra lang	132,00	95°C	09171683	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/re - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust, extra lang	132,00	95°C	09171631	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/re - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust, extra lang	144,50	95°C	09171648	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/re - XL	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, robust, extra lang	172,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/f - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch	144,70	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/f - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch	151,40	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/f - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch	151,40	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/f - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch	170,90	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ef - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, extra lang	144,70	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ef - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, extra lang	151,40	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ef - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, extra lang	151,40	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ef - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, extra lang	170,90	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/rf - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, robust	163,95	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/rf - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, robust	171,45	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/rf - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, robust	171,45	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/rf - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, robust	194,05	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/rf - XL	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Flausch, robust	247,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ref - XS	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Fl., robust, ex. lang	163,95	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ref - S	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Fl., robust, ex. lang	171,45	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ref - M	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Fl., robust, ex. lang	171,45	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ref - L	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Fl., robust, ex. lang	194,05	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2121/ref - XL	SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt Fl., robust, ex. lang	247,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2124 - M	SEGUFIX®-Handmanschette, verlängert	14,60	95°C	05025536	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2124 - L	SEGUFIX®-Handmanschette, verlängert	19,50	95°C	05025565	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2124/r - M	SEGUFIX®-Handmanschette, verlängert, robust	18,20	95°C	05025571	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2124/r - L	SEGUFIX®-Handmanschette, verlängert, robust	24,20	95°C	05025648	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2124/v - M	SEGUFIX®-Handmanschette, verlängert, Klett	21,60	95°C	05025743	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131 - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	147,40	95°C	09171849	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131 - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	147,40	95°C	09171743	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131 - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten	158,10	95°C	09171766	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/e - S	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, ex. lang	147,40	95°C	09171855	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/e - M	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, ex. lang	147,40	95°C	09171772	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/e - L	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, ex. lang	158,10	95°C	09171789	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/r - S	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, robust	163,10	95°C	09171861	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/r - M	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, robust	163,10	95°C	09171795	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/r - L	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, robust	175,40	95°C	09171803	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/r - XL	SEGUFIX®-Standard Oberschenkelmanschetten, robust	206,70	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999

Verschluss-Systeme
Art.-Nr. 1106 - 1215

Bandagen-System
Art.-Nr. 2203 - 2250

Zusatz-Gurte
Art.-Nr. 3110 - 3245

Akut-System
Art.-Nr. 4213 - 4235


Mobile-Fixierung
Art.-Nr. 5204 - 5245

Transport-System
Art.-Nr. 6040 - 6276

Sitzgurt-System
Art.-Nr. 7240 - 7280

Zubehör / Einzelteile
Art.-Nr. 8010 - 8022

SEGUFIX®-Bandagen-System (siehe Seite 14 - 23)

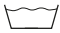Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
2131/re - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten robust, extra lang	163,10	95°C	09171878	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/re - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten robust, extra lang	163,10	95°C	09171826	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/re - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten robust, extra lang	175,40	95°C	09171832	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/re - XL	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten robust, extra lang	206,70	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/f - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch	182,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/f - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch	182,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/f - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch	201,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ef - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, extra lang	182,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ef - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, extra lang	182,30	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ef - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, extra lang	201,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/rf - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust	202,55	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/rf - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust	202,55	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/rf - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust	224,95	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/rf - XL	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust	281,20	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ref - S	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust, extra lang	202,55	95°C	09171878	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ref - M	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust, extra lang	202,55	95°C	09171826	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ref - L	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust, extra lang	224,95	95°C	09171832	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2131/ref - XL	SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten Flausch, robust, extra lang	281,20	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/r - S	SEGUFIX®-Kompakt, robust	209,80	95°C	09170376	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/r - M	SEGUFIX®-Kompakt, robust	217,80	95°C	09167753	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/r - L	SEGUFIX®-Kompakt, robust	233,80	95°C	09170382	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/re - S	SEGUFIX®-Kompakt, robust, extra lang	209,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/re - M	SEGUFIX®-Kompakt, robust, extra lang	217,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999
2150/re - L	SEGUFIX®-Kompakt, robust, extra lang	233,80	95°C	—	19.99.99.0999	50.99.99.0999


*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer


r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss


SEGUFIX®-Zusatz-Gurte (siehe Seite 24 - 25)

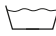Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
3140	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt	12,55	95°C	09170560	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3140/r	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt, robust	14,85	95°C	09170577	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3141	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt	10,25	95°C	09170583	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3141/r	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt, robust	12,55	95°C	09170608	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3142	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt	11,25	95°C	09170614	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3142/r	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt, robust	13,75	95°C	09170620	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3143	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt	8,95	95°C	09170637	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3143/r	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt, robust	11,25	95°C	09170643	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3144	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt	11,00	95°C	09170666	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3144/r	SEGUFIX®-Verlängerungsgurt, robust	12,70	95°C	09170672	19.99.99.0002	50.99.99.0002
3110/r	SEGUFIX®-Beinbügelgurt, robust	14,20	95°C	09167322	19.99.99.0002	50.99.99.0002


SEGUFIX®-Akut-Fixierung (siehe Seite 26 - 27)

Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
4113/r - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust	90,90	95°C	09169373	—	—
4113/r - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust	90,90	95°C	09169338	—	—
4113/r - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust	97,00	95°C	09169344	—	—
4113/r - XL	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust	115,00	95°C	—	—	—
4113/re - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust, extra lang	90,90	95°C	09169396	—	—
4113/re - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust, extra lang	90,90	95°C	09169350	—	—
4113/re - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust, extra lang	97,00	95°C	09169367	—	—
4113/re - XL	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter, robust, extra lang	115,00	95°C	—	—	—
4114/r - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust	55,40	95°C	09169456	—	—
4114/r - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust	55,40	95°C	09169404	—	—
4114/r - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust	69,20	95°C	09169410	—	—
4114/re - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust, extra lang	55,40	95°C	09169462	—	—
4114/re - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust, extra lang	55,40	95°C	09169427	—	—
4114/re - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand, robust, extra lang	69,20	95°C	09169433	—	—
4115/r - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust	55,40	95°C	09169522	—	—
4115/r - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust	55,40	95°C	09169479	—	—
4115/r - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust	69,20	95°C	09169485	—	—
4115/re - S	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust, extra lang	55,40	95°C	09169539	—	—
4115/re - M	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust, extra lang	55,40	95°C	09169491	—	—
4115/re - L	SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß, robust, extra lang	69,20	95°C	09169516	—	—

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung / Mobile Fixierung (siehe Seite 28 - 31)

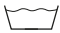Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
5101/r - XS	SEGUFIX®-Fixiergürtel, robust	120,80	95°C	—	—	—
5101/r - M	SEGUFIX®-Fixiergürtel, robust	141,20	95°C	—	—	—
5101/r - L	SEGUFIX®-Fixiergürtel, robust	156,80	95°C	—	—	—
5101/r - XL	SEGUFIX®-Fixiergürtel, robust	200,40	95°C	—	—	—
5104/r - XS	SEGUFIX®-Handmanschette für Fixiergürtel, robust	14,60	95°C	—	—	—
5104/r - M	SEGUFIX®-Handmanschette für Fixiergürtel, robust	15,90	95°C	—	—	—
5104/r - L	SEGUFIX®-Handmanschette für Fixiergürtel, robust	19,00	95°C	—	—	—
5104/r - XL	SEGUFIX®-Handmanschette für Fixiergürtel, robust	23,70	95°C	—	—	—
5118	SEGUFIX®-Fixierhilfe	30,70	95°C	05111098	—	—
5143 - S	SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter	76,40	95°C	—	—	—
5143 - M	SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter	76,40	95°C	09170264	—	—
5143 - L	SEGUFIX®-Tragengurt-Schulter	81,60	95°C	09170270	—	—
5145 - M	SEGUFIX®-Tragengurt-Fuß	68,80	95°C	09170287	—	—

SEGUFIX®-Transport-System (siehe Seite 32 - 35)

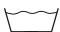Art.-Nr.	Produktname	Gesamtlänge*	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
6040	SEGUFIX®-Polster	—	29,50	30°C	—	—	—
6116/v - S	SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	—	37,30	30°C	09170525	18.99.99.0906	—
6116/v - M	SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	—	40,40	30°C	09170531	18.99.99.0906	—
6116/v - L	SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	—	43,50	30°C	09170548	18.99.99.0906	—
6140 - S	SEGUFIX®-Rückhaltegurt	—	120,60	30°C	09169924	18.99.99.0906	—
6140 - M	SEGUFIX®-Rückhaltegurt	—	127,60	30°C	09169930	18.99.99.0906	—
6140 - L	SEGUFIX®-Rückhaltegurt	—	131,50	30°C	09169947	18.99.99.0906	—
6156/v - XS	SEGUFIX®-Multigurt	160 cm	44,90	30°C	09170152	18.99.99.0906	—
6156/v - S	SEGUFIX®-Multigurt	180 cm	44,90	30°C	09170169	18.99.99.0906	—
6156/v - M	SEGUFIX®-Multigurt	200 cm	53,10	30°C	09170175	18.99.99.0906	—
6156/v - L	SEGUFIX®-Multigurt	240 cm	53,10	30°C	09170181	18.99.99.0906	—
6166	SEGUFIX®-Beckengurt	—	46,90	30°C	09170198	18.99.99.0906	—
6176	SEGUFIX®-Beckenhosengurt	—	59,40	30°C	—	18.99.99.0906	—


*ca. Maße – Gurte sind nicht vorgewaschen – bis zu 8% Schrumpfung möglich

Empfohlene Verkaufspreise
in € ohne Mehrwertsteuer


r = robust
f = Flausch

e = extra lange Betthalterung
v = Velcro® / Klettverschluss

SEGUFIX®-Sitzgurt-System (siehe Seite 36 - 39)

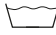Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
7140 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt, Schnappverschluss + Magnet.	69,40	95°C	09170206	18.99.99.0906	—
7140 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt, Schnappverschluss + Magnet.	75,60	95°C	09170212	18.99.99.0906	—
7140 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt, Schnappverschluss + Magnet.	83,30	95°C	09170229	18.99.99.0906	—
7140/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Schnappver. + Magnet.	103,70	95°C	—	18.99.99.0906	—
7140/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Schnappver. + Magnet.	110,50	95°C	—	18.99.99.0906	—
7140/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Schnappver. + Magnet.	127,00	95°C	—	18.99.99.0906	—
7146 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt, Magnetverschluss	82,40	95°C	09170235	18.99.99.0906	—
7146 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt, Magnetverschluss	89,50	95°C	09170241	18.99.99.0906	—
7146 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt, Magnetverschluss	101,80	95°C	09170258	18.99.99.0906	—
7146/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Magnetverschluss	116,70	95°C	—	18.99.99.0906	—
7146/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Magnetverschluss	124,70	95°C	—	18.99.99.0906	—
7146/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt Flausch, Magnetverschluss	145,50	95°C	—	18.99.99.0906	—
7150 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	104,00	95°C	09170689	18.99.99.0906	—
7150 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	110,20	95°C	09170695	18.99.99.0906	—
7150 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	120,90	95°C	09170703	18.99.99.0906	—
7150/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	138,30	95°C	—	18.99.99.0906	—
7150/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	145,10	95°C	—	18.99.99.0906	—
7150/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Schnapp. + Magnet.	164,60	95°C	—	18.99.99.0906	—
7156 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	117,00	95°C	09170726	18.99.99.0906	—
7156 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	124,10	95°C	09170732	18.99.99.0906	—
7156 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	136,40	95°C	09170749	18.99.99.0906	—
7156/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	151,30	95°C	—	18.99.99.0906	—
7156/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	159,00	95°C	—	18.99.99.0906	—
7156/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt, Magnetverschluss	180,10	95°C	—	18.99.99.0906	—
7160 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	130,90	95°C	09170755	18.99.99.0906	—
7160 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	140,80	95°C	09170761	18.99.99.0906	—
7160 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	151,70	95°C	09170778	18.99.99.0906	—
7160/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	165,20	95°C	—	18.99.99.0906	—
7160/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	175,70	95°C	—	18.99.99.0906	—
7160/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt Oberschenkeln., Schnapp. + Magnet.	195,40	95°C	—	18.99.99.0906	—
7166 - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	143,20	95°C	09170784	18.99.99.0906	—
7166 - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	153,10	95°C	09170790	18.99.99.0906	—
7166 - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	164,00	95°C	09170809	18.99.99.0906	—
7166/f - S	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	177,50	95°C	—	18.99.99.0906	—
7166/f - M	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	188,00	95°C	—	18.99.99.0906	—
7166/f - L	SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmansch., Magnet.	207,70	95°C	—	18.99.99.0906	—
7180	SEGUFIX®-Fußgurt Transport	24,60	95°C	—	—	—

SEGUFIX®-Etiketten (siehe Seite 6 - 7)

Art.-Nr.	Produktname	Preis/€		PZN	HMV	PHMV
8020	SEGUFIX®-Kunden-Etiketten	2,20	95°C	—	—	—
8021	SEGUFIX®-Kunden-Etiketten Nachrüstung	2,80	95°C	—	—	—

Verschluss-Systeme
Art.-Nr. 1106 - 1215

Bandagen-System
Art.-Nr. 2203 - 2250

Zusatz-Gurte
Art.-Nr. 3110 - 3245

Akut-System
Art.-Nr. 4213 - 4235

Mobile-Fixierung
Art.-Nr. 5204 - 5245

Transport-System
Art.-Nr. 6040 - 6276

Sitzgurt-System
Art.-Nr. 7240 - 7280

Zubehör / Einzelteile
Art.-Nr. 8010 - 8022

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Geltung der Bedingungen

Für alle Geschäfte der Fa. SEGUFIX* GmbH & Co. KG, nachstehend Lieferer genannt, gelten die nachstehenden Bedingungen, soweit im Angebot oder in der Auftragsbestätigung des Lieferers nichts anderes angegeben ist. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Bestellers sowie Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt werden.

2. Angebot und Vertragschluss

Alle Vereinbarungen, gleichgültig, ob sie bei oder nach Vertragschluss getroffen werden, bedürfen der Schriftform.

3. Leistungsumfang und Preisstellung

3.1 Den Preisbestimmungen liegen grundsätzlich unsere jeweils gültigen Preislisten zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer zugrunde. Bei schriftlichen Auftragsbestätigungen sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer maßgebend. Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweiligen Auftrag.

3.2 Die Preise zu Lieferungen und Leistungen verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart, ab Werk. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Der Frachtberechnung wird der jeweils gültige Tarif zugrunde gelegt. Insbesondere gehen Zölle, Konsulatsgebühren und sonstige aufgrund von Vorschriften außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhobenen Steuern, Abgaben, Gebühren sowie damit in Zusammenhang stehende Kosten zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung einschließlich Zoll oder sonstigen Abgaben beruht der angegebene Preis auf den zur Zeit des Angebotes geltenden Sätzen. Berechnet werden die tatsächlichen Kosten. Eventuell anfallende Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet.

3.3 Teillieferungen sind jederzeit zulässig.

3.4 Die Versandkostenpauschale für Lieferungen im Inland beträgt zum Zeitpunkt der Drucklegung 6,50 € zzgl. der jeweiligen gesetzlichen MwSt.

4. Zahlungsbedingungen

4.1 Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungsstellung auf eine der in der Rechnung angegebenen Bankverbindungen zu leisten. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn der Lieferer innerhalb der Frist über den Betrag verfügen kann. Zahlungen können nach Wahl des Lieferers auf andere noch offen stehende Forderungen verrechnet werden.

4.2 Schecks und – soweit Wechselzahlungen vereinbart sind – Wechsel werden erfüllungshalber angenommen. Diskont- und Einzugsgebühren sowie Zinsen sind dem Lieferer unverzüglich zu vergüten.

4.3 Verzug tritt bei Mahnung nach Fälligkeit ein, jedenfalls aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung. Sofern nicht ein höherer Verzugsschaden nachgewiesen wird, ist die Vergütung ab Fälligkeit mit 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

4.4 Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Besteller mit der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforderung des Lieferers sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Lieferer ist in diesen Fällen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4.5 Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen tatsächlich vorhandener oder behaupteter Mängel ist der Besteller nicht gestattet, wenn er Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist.

Etwas anderes gilt dann, wenn dem Lieferer eine grobe Vertragsverletzung zur Last fällt, er für seine Leistungen bereits den Teil des Entgeltes erhalten hat, der seiner Leistung entspricht oder wenn der Gegenanspruch, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.

Der Lieferer ist in jedem Falle berechtigt, den vom Besteller einbehaltenen Betrag durch eine selbstschuldnerische, auf die Gewährleistungszeit befristete Bankbürgschaft abzulösen.

4.6 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn, die Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Der Lieferer ist berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung – auch durch Bürgschaft – abzuwenden.

4.7 Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich der Lieferer entsprechend der jeweiligen Bonität vor, die vom Besteller erbetene Lieferung nur gegen Nachnahme durchzuführen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt worden ist.

Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig. Werden die gelieferten Waren von anderer Seite in Anspruch genommen, insbesondere gepfändet, so ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer hiervon sofort Mitteilung zu machen.

Ein Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht berechtigt den Lieferer zum Rücktritt vom Vertrag.

5.2 Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht oder der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist Insolvenzantrag gestellt (Sicherungsfall), gelten folgende Sicherungsabreden:

Der Besteller tritt für den Fall der – im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zulässigen – Weiterveräußerung der Vorbehaltsware dem Lieferer schon jetzt bis zur Tilgung sämtlicher Forderungen des Lieferers, die ihm aus dem Weiterverkauf entstehenden künftigen Forderungen gegen seine Kunden sicherheitsshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen, die sich im Rahmen bestehender Kontokorrentverhältnisse oder bei Beendigung derartiger Verhältnisse des Bestellers mit seinen Kunden ergeben.

Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Er ist jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. Auf Verlangen des Lieferers hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben und dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Unterlagen, z. B. Rechnungen, auszuhändigen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der Einziehung trägt der Besteller.

Erhält der Besteller aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung Wechsel, so geht das Eigentum an diesen Papieren mit dem verbrieften Recht sicherungshalber auf den Lieferer über. Die Übergabe der Wechsel wird durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie für den Lieferer in Verwahrung nimmt und sie sodann unverzüglich und indossiert an den Lieferer abliefern. Für den Fall, dass der Gegenwert der an den Lieferer abgetretenen Forderung in Schecks bei dem Besteller oder bei einem Geldinstitut des Bestellers eingehen sollte, ist dieser zur unverzüglichen Meldung der Eingänge und zur Abführung verpflichtet. Das Eigentum an den Schecks geht mit dem verbrieften Recht auf den Lieferer über, sobald sie der Besteller erhält. Die Übergabe der Papiere wird durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie für den

Lieferer in Verwahrung nimmt, um sie sodann unverzüglich und indossiert an den Lieferer abzuliefern.

5.3 Bei Eintreten eines des in Ziff. 5.2. geschilderten Sicherungsfalls ist der Lieferer weiter berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu nehmen. Ebenso kann er die weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend machen. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Besteller gewährt dem Lieferer oder dessen Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

6. Lieferzeit und Verzug

6.1 Lieferzeiten sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer schriftlich zugesagt worden sind.

6.2 Die Einhaltung der Lieferzeit setzt voraus, dass der Besteller seinen vertraglich übernommenen Mitwirkungspflichten nachkommt, insbesondere der Auftrag vollständig geklärt ist, alle Genehmigungen erteilt sowie sämtliche vom Besteller beizubringende Unterlagen, Zahlungen und Sicherheiten termingemäß beim Lieferer eingegangen sind. Die Lieferzeit beginnt daher erst zu laufen, wenn die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vereinbarten Frist versandbereit und eine entsprechende Mitteilung an den Besteller abgesandt ist.

6.3 Ist der Lieferer an der rechtzeitigen Durchführung der Lieferungen und Leistungen durch Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Feuer, Naturkatastrophen, Transportbehinderungen, Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, behördliche Maßnahmen oder Verordnungen oder den Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb seines Willens liegen, gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

6.4 Verzögert sich die Lieferzeit aus einem vom Lieferer zu vertretenden Umstand, so kann der Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn er dem Lieferer zuvor unter Ablehnungsandrohung erfolglos eine Nachfrist von mindestens zwei Wochen gesetzt hat und diese Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Macht in diesem Falle der Besteller von seinem Recht Gebrauch, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, so ist der Besteller so zu stellen, wie er stehen würde, wenn er nicht auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut hätte. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Lieferer ein grobes Verschulden zur Last fällt.

6.5 Ansprüche für Schäden, die der Besteller auch aus einer verspäteten Lieferung erleidet, insbesondere auch solche aus schuldhafter Vertragsverletzung, fahrlässig begangener unerlaubter Handlung und für Folgeschäden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, bei Zusicherungen oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit für vertragstypische vorhersehbare Schäden aus rechtlichen Gründen zwingend gehaftet wird.

6.6 Der Besteller trägt die Mehrkosten einer durch ihn verursachten Unterbrechung oder Verzögerung der dem Lieferer obliegenden Arbeiten.

6.7 Verzögert sich der Versand aus vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist der Lieferer berechtigt, den Liefergegenstand auf Gefahr des Bestellers einzulagern und Ersatz der entstehenden Kosten zu verlangen. Der Lieferer ist in diesem Fall berechtigt, eine Versicherung gegen Lagerisiken zu Lasten des Bestellers abzuschließen.

6.8 Falls es Sache des Bestellers ist, die Transportmittel für die Lieferung bereit zu stellen und er dies zu der vertraglich vorgesehenen Zeit nicht bewirkt, wird der Lieferer von seiner Lieferpflicht durch Einlagerung und Versicherung der Liefergegenstände auf Kosten und Risiko des Bestellers frei. Die Spediteur- bzw. die Übernahmescheinung gilt als Beleg für die vertragsgemäße Lieferung.

7. Gefahrübergang

Grundsätzlich geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald der Liefergegenstand das Werk verlässt oder dem Besteller im Werk zur Verfügung gestellt wird. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

8. Gewährleistung

8.1 Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Besteller die Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Lieferer unverzüglich Anzeige zu machen.

8.2 Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff HGB.

8.3 Die Gewährleistungsansprüche sind nach Wahl des Lieferers auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei fehlgeschlagenem ersten Nachbesserungsversuch bzw. erneuter Mangelhaftigkeit der Ersatzlieferung ist der Lieferer berechtigt, ein weiteres Mal eine Nachbesserung bzw. eine Ersatzlieferung vorzunehmen. Dies gilt nicht, wenn dem Besteller ein weiterer Nachbesserungsversuch oder eine weitere Ersatzlieferung im Einzelfall unzumutbar ist, wobei den Besteller für die Unzumutbarkeit die Darlegungs- und Beweislast trifft. Erst wenn auch der zweite Nachbesserungsversuch bzw. die Ersatzlieferung ebenfalls fehlgeschlagen ist, hat der Besteller das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

8.4 Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, soweit diese nicht aus dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften resultieren, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Lieferers.

9. Rücksendung nicht beanstandeter Waren

Rücknahme von originalverpackter Ware kann beantragt werden. Hierbei wird eine Gebühr fällig.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10.2 Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche ist der Sitz des Lieferers.

10.3 Ist der Besteller Kaufmann, so ist – auch für Scheck- und Wechselverfahren – Jestedburg ausschließlicher Gerichtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller zum Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, jedes gesetzlich zuständige Gericht anzurufen.

10.4 Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so werden sich die Vertragspartner unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere rechtlich zulässige Weise zu erreichen.

10.5 Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für Auslandslieferungen.

10.6 Für alle in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Willenserklärungen des Lieferers sowie des Bestellers gilt die Schriftform.

Bestellformular Kopiervorlage. Vielen Dank für Ihren Auftrag! Ihr SEGUFIX®-Team.

SEGUFIX®-Bandagen
Das Humane System GmbH & Co. KG
Allerbeeksring 33
D-21266 Jesteburg

Fax: 04183 / 500-200

Telefon: 04183 / 500-0 E-Mail: info@segufix.de

Besuchen Sie uns auf unserer Internet-Seite unter: www.segufix.de oder bestellen Sie online unter: www.segufix-shop.de

Rechnungsanschrift

Kunden-Nr.: _____

Firma: _____
Branche: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____

Ansprechpartner bei Rückfragen

Herr Frau
Name, Vorname: _____
Funktion/Titel: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

Lieferanschrift

(falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Name, Vorname: _____
Abteilung: _____
Telefon: _____

Erstbestellung Folgebestellung
Auftrags-Nr.: _____
Kommission: _____

Table with 5 columns: Menge, Art.-Nr., Artikel-Bezeichnung, Einzelpreis, Gesamtpreis. Includes Burbach+Goetz logo and contact information.

Summe: _____
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (siehe Seite 50).



Ort, Datum Unterschrift / Stempel



SEGUFIX®

Seit über 40 Jahren:

Kompetenz

Erfahrung

Qualität

Stabilität

Innovation

©/A&@a|

Burbach+Goetz

Deutsche Sanitätshaus GmbH



- Stegemannstraße 5-7 56068 Koblenz
- Tel: 02 61-1 33 88-0 Fax: 02 61-1 33 88-22
- Onlineshop: www.burbach-goetz.de
- E-Mail: info@burbach-goetz.de

Auflage 10.7 - 2015-12

SEGUFIX®-Bandagengurte sowie SEGUFIX®-Tragengurte bestehen aus einem kochfesten Baumwoll-/Zellwollgemisch. SEGUFIX®-Transportgurte bestehen aus Polyester und teilweise aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch.

Sonderanfertigungen und Produktschulungen auf Anfrage möglich.

Empfohlene Verkaufspreise in € ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form, Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Velcro® ist eine registrierte Handelsmarke von Velcro® Industries B.V.

SEGUFIX® ist eine registrierte Handelsmarke von SEGUFIX®-Bandagen, Das Humane System GmbH & Co. KG.

© SEGUFIX®-Bandagen, 2015

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Verbreitung über elektronische Systeme/Datenträger, auch auszugsweise, nur mit vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung.

Alle diesbezüglichen Anfragen richten Sie bitte an: SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG, Allerbeeksring 33, 21266 Jesteburg, Deutschland.

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG
Postfach 1142 · 21262 Jesteburg
Allerbeeksring 33 · 21266 Jesteburg
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 4183 500-0
Telefax: +49 (0) 4183 500-200
E-Mail: info@segufix.de
www.segufix.de
www.segufix-shop.de