

SICHERHEITSHINWEISE

Das Anlegen von bioCARE-FIX-Systemen darf nur durch geschultes Personal erfolgen (siehe Information BfArM vom 04.12.03)

Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten bzw. dem Hersteller auf.

WARNUNG!

Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-FIX-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall die Strangulierung des Patienten bewirken.

Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

1. Wählen Sie die passende Größe. (**S, M, L, XL**)

PATIENTENUMFANG – Bauchgurt:

S = 45 – 75 cm. / M = 70 – 110 cm. / L = 105 – 145 cm./ XL = 120 – 162 cm

Farblich gekennzeichnet: S = Dunkelblau, / M = Grün, / L = Grau, / XL = Hellblau

2. Legen Sie das bioCARE-FIX-System laut Gebrauchsanleitung an.
3. Überwachen Sie den fixierten Patienten.
4. Bei Patienten mit einem Herzschrittmacher muss der Abstand zwischen dem Magnetschlüssel und dem Schrittmacher mindestens 15 cm aufweisen, um Interferenzen und Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. In diesem Fall kann der Thorax mit Steckschlössern gesichert werden. ***Achtung: Bitte nur Original bioCARE Köpfe auf den dazugehörigen Sockel verwenden. Die Köpfe des Steckschlösses dürfen nur auf die Sockel für Steckschlösser angewendet werden.***
5. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme. Die Schlösser dürfen nicht gewaschen oder in Flüssigkeiten getaucht werden, da dadurch der Mechanismus unbrauchbar werden kann.
6. Die Schlüssel verbleiben bei dem zuständigen Betreuer.

Seitenbänder verhindern, dass der Patient aus dem Bett rollen kann. Sie verhindern aber nicht, dass der Patient sich aufrichten kann.

Empfehlung bioCARE: durchgehende Bettgitter generell hochstellen.



Märkerstrasse 8

D-56317 Urbach

Fon: +49 (0) 2689-9273-0

Fax: +49 (0) 2689-9273-11

E-mail: info@buw-biocare.com

Internet: www.buw-biocare.com