

Das MOSAIC® Kissen wurde speziell als Alternative zu schweren Gelkissen entwickelt.

Es wiegt nur 500 g und lässt sich hervorragend reinigen. Dieses Kissen findet seinen Einsatz...

- bei bereits bestehenden Hautrötungen,
- als Prophylaxe-Unterstützung,
- postoperativ, z.B. bei Hämorrhoiden oder Bandscheibenvorfällen.

Gewichtsbeschränkung: 115 kg



Das HARMONY® Kissen dient der Prophylaxe oder der Therapie bereits bestehender Hautdefekte.

Durch die Kombination aus der anatomisch vorgeformten Basisplatte aus Schaumstoff und der luftgefüllten Auflage nach dem patentierten ROHO® AIR FLOATION™ Prinzip, bietet es mit seinen nur 700 g nicht nur Hautschutz, sondern unterstützt auch bei der Dekubitusprophylaxe und bei bestehenden Hautrötungen. Als „Leichtgewicht“ eignet es sich besonders für die Mitnahme auf Reisen, im Auto oder beim Sport.



Gewichtsbeschränkung: 115 kg

Das AirLITE® Kissen ist ein anatomisch vorgeformtes, leichtgewichtiges Standard-Sitzkissen.

Die körpergerecht vorgeformte Schaumstoffbasis passt sich den Bewegungen des Nutzers permanent an, wobei der leichte Sitzkeil für Stabilität sorgt. Der Sakralbereich ist durch die integrierten Luftknoten besonders geschützt. Die Unterseite des wechselbaren Bezugs ist mit Antirutschbeschichtung versehen. So bietet AirLITE® seinen Nutzern gute Entlastung und unterstützt das zentrierte Sitzen in einfachsten Rollstühlen. Das Kissen wiegt **nur** 960 g.




Gewichtsbeschränkung: 115 kg



Anti-Dekubitus- & Positionierungskissen

Kurzinformation für Fachkreise

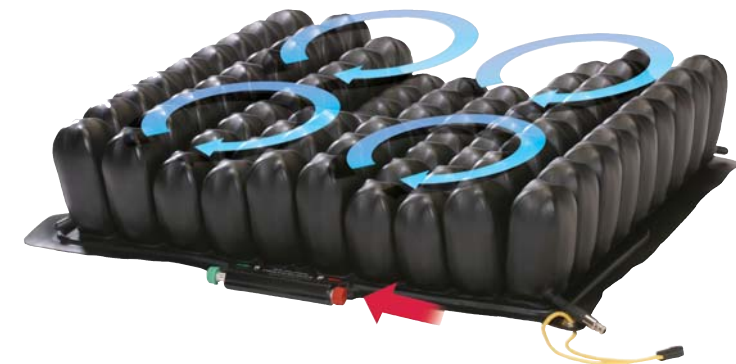

ROHO® QUADTRO® SELECT® Kissen (10 cm)

Hilfsmittelnummer: 11.39.03.4003 (alt: 11.11.02.0031)

Die ROHO® Anti-Dekubitus- und Positionierungskissen nach dem bewährten Trockenfloatations-Prinzip.



Durch die gebrochene Oberfläche werden ungünstige Eigenschaften wie Reibung und Scherkräfte reduziert. Der sehr geringe Gegendruck des Systems unterstützt die Durchblutung der gefährdeten bzw. betroffenen Areale. Das ROHO® Prinzip lautet:

„Man sitzt im Kissen – nicht auf dem Kissen.“

$$p = \frac{F}{A} \quad \text{Druck} = \frac{\text{Kraft}}{\text{Fläche}}$$

Je tiefer man in das Kissen einsinkt, desto größer wird die Fläche, auf die sich der Druck verteilt.

Das 10 cm hohe ROHO® QUADTRO® SELECT® Kissen gewährt durch seine ca. 7 cm große Einsinktiefe Schutz gegen Druckstellen und/oder unterstützt die Therapie bereits bestehender Druckgeschwüre.

Die einzelnen Noppen aus Neopren sind durch Luftkanäle miteinander verbunden und passen sich individuell den Körperkonturen an.

Positionierung & Hautschutz

Bei asymmetrischen Körperhaltungen, z.B. bedingt durch Schlaganfall, Amputation, Skoliose und Beckenschiefstand ermöglicht das einzigartige Positionierungssystem eine Verbesserung der Sitzposition. Durch Positionierung findet eine Minderung der einseitigen Druckbelastung statt. Die Positionierungsmöglichkeit im Vier-Kammer-System dient neben dem bereits bewährten ROHO® Hautschutz, der Positionierung und somit dem Ausgleich einer Behinderung und der Sicherstellung der Krankenbehandlung (Dekubitus).

Keine Gewichtsbeschränkung!

ROHO® QUADTRO® SELECT® Kissen (5 cm)

Hilfsmittelnummer: 11.39.03.4004 (alt: 11.11.02.0031)

Das 5 cm QUADTRO® SELECT® Kissen wird von aktiven Nutzern bevorzugt, da der Transfer etwas einfacher ist.



Es bietet einen Positionierungsspielraum von ca. 2 cm, wohingegen das 10 cm hohe Kissen einen Spielraum von 5-7 cm ermöglicht. Nutzern mit prominentem Sitzbeinhöcker empfehlen wir daher den Einsatz des 10 cm ROHO® QUADTRO® SELECT® Kissens.

Keine Gewichtsbeschränkung!

ROHO® CONTOUR SELECT™ Kissen

Hilfsmittelnummer: 11.39.03.4002

Die anatomisch vorgeformte Sitzfläche des CONTOUR SELECT™ Kissens verbindet bestmöglichen Hautschutz mit Sitzstabilität.



Die höheren Noppen an den Seiten erlauben eine gerade Beinführung. Diese laterale Unterstützung, kombiniert mit der „Sitzmulde“ im Sakralbereich, reduziert die Neigung des Anwenders und verhindert sein „nach vorn Rutschen“.

Das ROHO® CONTOUR SELECT™ Kissen bietet darüber hinaus hervorragende druckentlastende Eigenschaften.

Keine Gewichtsbeschränkung!

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.etac.de

Beratung • Verkauf • Service

Etac GmbH
Bahnhofstraße 131
45770 Marl

TELEFON: 02365 / 98 71-0
E-MAIL: info@etac.de

FAX: 02365 / 98 61 15
INTERNET: www.etac.de

etac