

Philips Respironics Amara Mund-Nasen-Maske – Die Maske mit dem “Klick” –

Größenbestimmung in drei Schritten

Vier verschiedene Maskenkissen stehen zur Auswahl:



Den Mund leicht öffnen (Zeigfingerbreit).

1



Der untere Teil des Maskenkissens sollte auf der Kinnefalte aufliegen.

2



Der obere innere Teil des Maskenkissens sollte auf dem Nasenrücken, direkt unterhalb des Augenlids aufliegen.

3

TIPPS

- Bitte wählen Sie immer die kleinstmögliche Maskenkissen-Größe aus.
- Für kleinere Gesichter empfiehlt sich der kleinere Maskenrahmen (RS).

PHILIPS

RESPIRONICS

Philips Respironics **Amara** Mund-Nasen-Maske – Die Maske mit dem “Klick” –

Maskenanpassung in sechs Schritten



Setzen Sie die Maske bei leicht geöffnetem Mund komfortabel auf Ihr Gesicht. Ziehen Sie dann das Kopfband über Ihren Kopf.

1



Halten Sie die Maske in Position und rasten Sie die Clips ein.

2



Ziehen Sie die Laschen des Kopfbandes zurück, um die oberen und unteren Riemen gleichmäßig anzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Riemen gleichmäßig und nicht zu fest angezogen sind. Das Stirnpolster soll die Stirn leicht berühren.

3



Falls erforderlich, passen Sie mit dem Einstellknopf der Stirnstütze den Druck des Maskenkissens auf dem Nasenrücken und der Kinnfalte an.

4



Überprüfen Sie das Kopfband. Die Riemen müssen parallel sein und flach an der Rückseite des Kopfes anliegen.

5



Schließen Sie den Schlauch am Therapiegerät und am Schnellverschluss der Maske an. Nehmen Sie die finalen Anpassungen im Liegen unter Therapiedruck vor.

6

PHILIPS

RESPIRONICS