

## Verwendungszweck

Der Wandhaltegriff „CASCADE“ ist ein ergonomisch geformter Griff aus Vollkunststoff. Er ist für den Einsatz im Dusch- und Wannbereich von Badezimmer oder anderen sanitären Einrichtungen geeignet.

Die Anbringung des Griffes kann horizontal, vertikal oder diagonal erfolgen. Der Griff kann beliebig (endlos) zu einer Griffkette erweitert werden.

## Pflege und Wartung

Der Wandhaltegriff wird mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger zu reinigen. Beachten Sie deren Produktinformation.

## Gewährleistung

Auf unsere Wandhaltegriffe geben wir eine Garantie von **24 Monaten**.



## Hinweis!

**Die Montageanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Beanstandungen/Rückfragen geben Sie bitte die Art.Nr. und die MA-Nr. an.**


## Inhalt in der Verpackung

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück
A	6020202	Wandhaltegriff	1
B	6020504	Aufnahmesockel	1
C	6020506	Kegelaufsatz	1
D	6020508	Abdeckkappe (2 x Ersatz)	4
E	6020010	Träger für Lochplatte	2
F	6020012	Lochplatte	2
G	8505835	Zylinder-Schraube M8x35 A2	2
H	8520550	Universalschraube 5,0x50	6
I	8555008	Fischer-Dübel S8	6
J	8500008	Mutter M8, DIN 934	2
K	-----	Inbuss-Schlüssel SW 5	1
	01.10.072	Montageanleitung-Cascade	1


## Abbildung/Inhalt

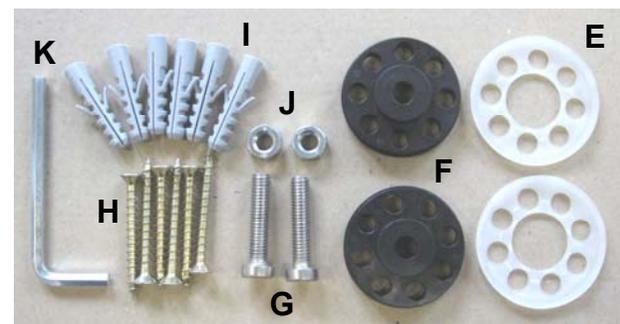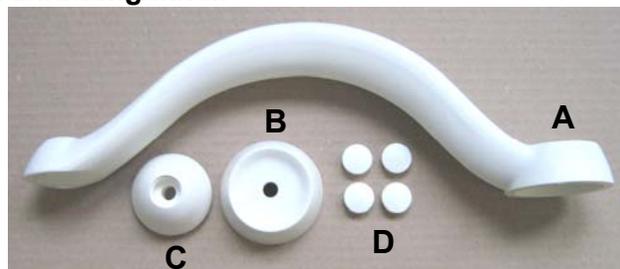

## Montage/Basisbausatz

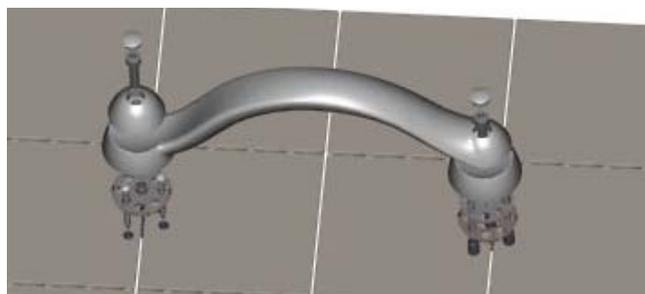

## Montage/Erweiterung zur Griffkette

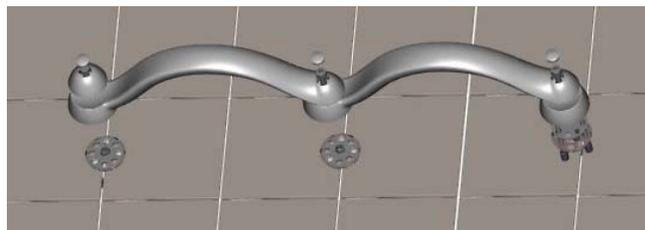

## Montagehinweise

Prüfen Sie vor der Montage des Wandhaltegriffes den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen, um eventuelle Beschädigungen bei der Anbringung des Wandhaltegriffes zu vermeiden.

**REBOTEC haftet nicht für Schäden die aus der Anbringung des Wandhaltegriffes resultieren.**

Die Anbringung des Wandhaltegriffes ist der Wandbeschaffenheit (Leichbau-, oder Trockenbauwände) anzupassen. Gegebenenfalls sind die beigelegten Schrauben und Dübel durch geeignetes Material zu ersetzen.

**Der Bohrungsabstand beträgt 290 mm.**



Überprüfen Sie den Wandhaltegriff nach der Montage auf festen und sicheren Sitz.

**Die Montage darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden!**

## Griffkette

Zur Erweiterung einer Griffkette werden folgende Teile für die Montage benötigt:



Die restlichen Teile des Bausatzes werden nicht benötigt.

## Sicherheitshinweise

- Griffbefestigung gemäß Wandbeschaffenheit unbedingt beachten.
- Äußerlich beschädigte oder nicht ordnungsgemäß befestigte Griffe nicht benutzen.

## Anwendungsbereiche Badezimmer



## Dusche



## Was wir sonst noch liefern ...

- Gehhilfen
- Achselstützen
- Duschhocker
- Dusch- und Toilettenstühle
- Rollatoren
- Patientenlifter
- Aufsteh- und Aufrichthilfen

Rufen Sie uns an.... wir informieren Sie gerne!

Ihr **REBOTEC**-Team



**REBOTEC** Rehabilitationsmittel GmbH  
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
Telefon: 05431/9416-0  
Telefax : 05431/9416-66  
<http://www.rebotec.de>  
e-mail: info@rebotec.de



**D** Montageanleitung

MA-Nr.: 01.10.072/01-08(KP)

**Wandhaltegriff**  
**„CASCADE“**

Art.-Nr.: 601.05.00

**CE**

Ihr Fachhändler:

