

### Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Produkt	Rohre	Oberteil
Unterarmgehstütze/UAG	eloxierte Alu-Legierung	Polyamid modifiziertes PA6

Art.Nr.	Bezeichnung (UAG=Unterarmgehstütze)	Ausführung	Griffhöhe von-bis cm	Armschale von-bis cm	Kapselgröße mm	max. Körpergewicht
180.50	Unterarmgehstütze	Travel im Beutel	81,0-95,0	24,0-26,5	22	120 kg

Zubehör						
160.10	Griffpolster, Standard					
161.10	Armschalenpolster					
165.00	Reflektor-Clip					
166.00	Eiskralle					
168.10.22	Antirutschpuffer „Big-Foot“ 22-24	mit Metalleinlage				
Ersatzteil						
200. ... 20	Saugkapsel 22 mm	mit Metalleinlage				

### Wiedereinsatz

Die Produkthaftung bezieht sich nur auf den Erstgebrauch der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte. Sollte ein Produkt nach dem Erstgebrauch wiederholt ausgegeben werden, muss dies erst durch den Fachhandel bzw. Hersteller überprüft werden. Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen auf das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

### Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **2 Jahre**. Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

### Gewährleistung

Auf die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine Garantie von **24 Monaten**. Hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produktes.

### Hinweis!

Die Betriebsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.

Bei Beanstandungen/Rückfragen geben Sie bitte die Art.Nr., Typ und die BA-Nr. an



## Betriebsanleitung

BA-Nr.: 01.01.053/01-11



**REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH**  
 D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
 Telefon: 05431/9416-0  
 Telefax : 05431/9416-66  
<http://www.rebotec.de>  
 e-mail: info@rebotec.de

# Gehhilfe TRAVEL



Travel im Beutel  
 (Inhalt: 1Paar)  
 Art.-Nr. 108.50




### Verwendungszweck

Die Gehhilfe ist für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dient der Erhöhung der Gangsicherheit. Die Anwendung dieser Gehhilfe kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise! Die Quetschverschraubung sorgt für ein geräuscharmes Gehen mit der Gehhilfe. Außerdem ist diese zerlegbar (längstes Stück 44 cm). Für den Transport der Gehhilfe wird ein Beutel angeboten.

**Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!**

## Montageanweisung und Inbetriebnahme

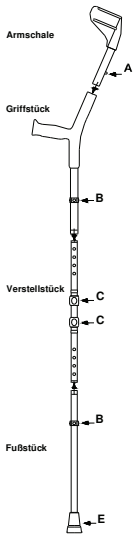

### 1. Schritt

Entnehmen Sie eine Armschale und ein Griffstück der Verpackung (Koffer oder Beutel).

### 2. Schritt

Stecken Sie die Armschale in das Griffstück, den Federbolzen (A) eindrücken und die Armschale bis zur ersten Arretierung (höchste Stellung) in das Griffstück einschieben. Federbolzen einrasten lassen

### 3. Schritt

Entnehmen Sie nun ein Verstellstück aus der Verpackung. Entfernen Sie den Verstell-Clip (B-Griffstück) und stecken das Griffstück in das Verstellstück. Schieben Sie das Verstellstück bis zur Deckung der ersten Bohrung vom Verstellstück und der Bohrung im Griffstück zusammen. Den Verstell-Clip (B) im Griffstück wieder einstecken.

### 4. Schritt

Entfernen Sie den Verstell-Clip (B-Fußstück) und stecken das Fußstück über das Verstellstück. Schieben Sie das Fußstück bis zur Deckung der ersten Bohrung vom Verstellstück zusammen. Den Verstell-Clip (B-Fußstück) wieder einstecken.

### 5. Schritt

Als letzten Schritt schieben Sie die beiden Quetschverschraubungen bis zum Gewindeanfang der Rohre und schrauben diese bis zum Festsitz auf das Rohr. Die Gehhilfe befindet sich jetzt in der höchsten Einstellung.

### 6. Schritt

Montieren Sie die zweite Gehhilfe wie zuvor beschrieben.

### Griffhöhenverstellung der Gehhilfe (4-fach verstellbar)

Die Höhenverstellung erfolgt über teleskopisierbares Alu-Rohr durch Verstell-Clip.

- Quetschverschraubung (C) durch Linksdrehung lösen.
- Verstellclip (B) herausziehen.
- Alu-Rohr in die gewünschte Position (Loch) verschieben.
- Verstellclip (B) einschnappen lassen.
- Quetschverschraubung (C) durch Rechtsdrehung richtig festdrehen. (Durch das Festdrehen vermindern Sie die Geräuschbildung bei der Benutzung.)

### Anpassen der Armschale (3-fach verstellbar)

- Federbolzen (F) in die Bohrung eindrücken.
- Armschale (G) in die gewünschte Position verschieben.
- Federbolzen (F) wieder in die Bohrung einrasten lassen.

## Austausch der Saugkapsel

Eine abgenutzte oder beschädigte Saugkapsel (E) ist auszutauschen. Ziehen Sie die Saugkapsel von dem Rohrende ab. Eine neue Saugkapsel - auf zugehörige Kapselgröße und Ausführung achten (siehe: Technische Daten) - aufschieben und den festen Sitz überprüfen.



**Hinweis!** Achten Sie darauf, dass sich in der Saugkapsel ein Metallplättchen befindet. Es schützt davor, dass die Kapsel vom Rohr der Gehhilfe durchstoßen werden kann. Die Folge könnte sonst sein, dass es zu einer Beschädigung des Fußbodens kommt. Risiko einer erhöhten Sturzgefahr durch Wegrutschen.

## Pflege und Wartung

Bei den Rohren reicht in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes trockenreiben aus. Alle Kunststoffteile reinigen Sie mit einem handelsüblichen milden Kunststoffreiniger – Produktinformationen beachten.

**Hinweis!** Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder öligen Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen. Prüfen Sie den festen bzw. richtigen Sitz des Verstell-Clips, der Saugkapsel und die Rohre. Bei Beschädigung oder Deformierung der Gehhilfe diese umgehend überprüfen lassen. Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich an einen Fachhändler. Bei einer Instandsetzung des Produktes nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.

**Lassen Sie Ihre Gehhilfe mindestens einmal jährlich von einem Fachhändler überprüfen.**

## Sicherheitshinweise

- Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen.
- Lassen Sie sich beim Überwinden von Hindernissen zu Ihrer eigenen Sicherheit von einer Begleitperson unterstützen, damit diese Sie bei einem Fallen auffangen kann.
- Führen Sie beim Begehen von Treppen eine Hand am Geländer, die andere Hand stützen Sie auf der Gehhilfe ab.
- Sollten Sie doch einmal Stürzen: Lassen Sie die Gehhilfe möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf die Gehhilfe fallen!



**Achtung! Gefahr möglich: Sturzgefahr durch Wegrutschen**

- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf.
- Benutzen Sie die Gehhilfe nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckfremd werden. (z.B.: Aufstehhilfe, zum Hebeln, Versetzen von Möbeln)
- Es dürfen keine mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Haftung!).
- An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) aufhängen.
- Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonnenstrahlung aussetzen. (z.B.: am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe)
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden.