

# TECHNISCHE DATEN

<b>ATTITUDE</b>	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
<b>Max. Benutzergewicht</b>	100 kg	100 kg	100 kg
<b>Rahmenbreite vorne (+ 2 cm verstellbar)</b>	26 – 46 cm	26 – 46 cm	26 – 46 cm
<b>Gewicht der Teile am Rollstuhl</b>	170 g	170 g	170 g
<b>Gesamtgewicht des Handbikes</b>	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
<b>Radgröße</b>	20"	20"	16"
<b>Höchstgeschwindigkeit des Motors</b>	–	6 km/h	6 km/h
<b>Motor</b>	–	250 W	250 W
<b>Akku</b>	–	14,5 Ah	9 Ah und 13,4 Ah
<b>Schalthebel</b>	Triggerhebel / Ganghebel	Triggerhebel / Ganghebel	–
<b>Gänge</b>	8 und 30	10	–
<b>Breite der V-Kurbel</b>	470 mm	470 mm	–
<b>Länge der Kurbel</b>	170 mm	170 mm	–
<b>Breite des Lenkers</b>	–	–	570 mm
<b>Bremse</b>	Scheibenbremse (160 mm)	Scheibenbremse (160 mm)	Scheibenbremse (160 mm)
<b>Parkbremse</b>	ja	ja	ja
<b>Rahmenfarbe</b>	31	31	31



Weitere Informationen zu den Produktoptionen entnehmen Sie bitte dem Bestellformular auf unserer Webseite. Dieses Dokument können Sie auch unter [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



## Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)

# *ATTITUDE* PURE FREIHEIT



# DIE KOMPLETTE ATTITUDE FAMILIE

---

Genieße deine Freiheit wie nie zuvor mit den neuen anklemmbaren ATTITUDE Handbikes.

Egal, ob Du Sport treibst oder Deine Mobilität verbessern möchtest, wir haben das passende ATTITUDE Handbike für Dich. Die manuelle Ausführung ist ein leichtes und manövrierfähiges Handbike für dein individuelles Training. Die Hybrid Variante ist das E-Bike für deinen Rollstuhl, fahrbar mit eigener Muskelkraft oder elektrischer Unterstützung. Das leistungsstarke Zuggerät Power bietet Dir volle Mobilität mit Elektroantrieb.



## ATTITUDE Manual

DAS KRAFTVOLLE TRAININGS-BIKE





## ATTITUDE Hybrid

DAS E-BIKE FÜR DEN ROLLSTUHL



## ATTITUDE Power

DAS LEISTUNGSSTARKE ZUGGERÄT



# IN SEKUNDENSCHNELLE FAHRBEREIT


Mit dem intelligenten Anklemmmechanismus wird das ATTITUDE in sekundenschnelle an deinen Rollstuhl an- und abgeklemmt.  
Ideal, wenn Du keine Zeit zu verlieren oder es eilig hast.

Der Anklemmmechanismus ist unkompliziert, rastet einfach und sicher an der Vorderseite deines Rollstuhls ein – ohne zusätzliche Teile oder unpraktische Kabel, die deine Beinfreiheit einschränken.



Nach dem Abklemmen verbleiben nur zwei kleine Bolzen (170 g) an deinem Rollstuhl.

- 1** Lasse die untere Halterung in die Bolzen einrasten.
- 2** Schwenke die oberen Klemmen nach unten.
- 3** Arretiere die Verbindung, indem Du den roten Hebel ziehst.

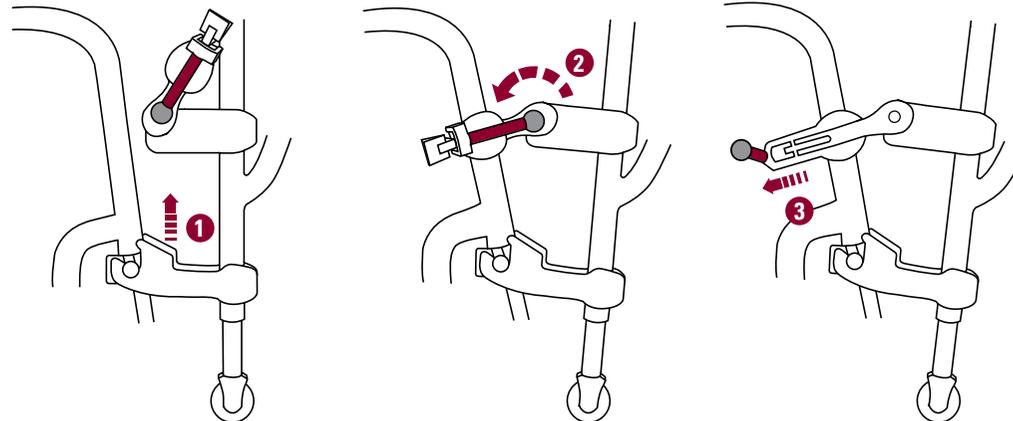



# MEHR FREIHEIT

Nicht nur beim Fahren der ATTITUDE Handbikes genießt du pure Freiheit, sondern auch beim An- und Abklemmen, sowie beim mühelosen Verstauen. Durch den ergonomischen Griff und die Stützräder kannst Du das ATTITUDE ganz einfach nur mit einer Hand manövrieren.



# IMMER STILVOLL UM DIE KURVE

Das leichte und sportliche ATTITUDE passt perfekt zu deinem SOPUR Rollstuhl. Mit dem schnittigen, modernen Design und 31 prägnanten Farben zur Auswahl kannst Du dein ATTITUDE ganz einfach an deinen individuellen Stil anpassen.



# *ATTITUDE*

MANUAL

DAS KRAFTVOLLE TRAININGS-BIKE



Das ATTITUDE Manual ist ideal, wenn Du deine Kraft und Ausdauer durch Handbiken aufbauen möchtest. 20 Zoll Vorderräder und 30 Gänge sorgen für ein außergewöhnliches Fahrgefühl, das für jedes Gelände passt. Die leistungsstarke Scheibenbremse sorgt für sanfte Geschwindigkeitsregelung. Leicht und einfach zu manövrieren - die perfekte Ergänzung für deinen Aktivrollstuhl.

*Manual*



**// DUAL DRIVE (3X10)**

30 Gänge sind ideal für jedes Gelände. Die Scheibenbremse ermöglicht eine sanfte Geschwindigkeitsregelung.




**// GANGHEBEL**

Der Ganghebel kann mit einer Hand betätigt werden und ermöglicht schnelles und einfaches Schalten.



**// FLASCHENHALTER**

Der Flaschenhalter ist für alle Standardflaschen geeignet (für alle ATTITUDE Handbikes erhältlich).

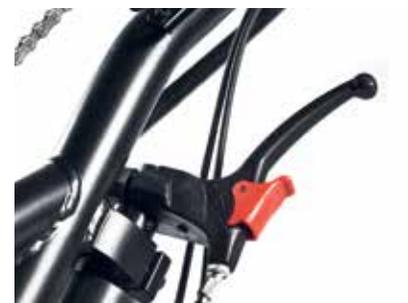

**// PARKBREMSE**

Eine einfach zu bedienende Parkbremse mit Einrastfunktion gehört bei allen ATTITUDE Modellen zur Standardausstattung.

# ATTITUDE

## HYBRID

### DAS E-BIKE FÜR DEINEN ROLLSTUHL



Das ATTITUDE Hybrid vereint alle gesundheitlichen Vorteile des Handbikes mit der Zuverlässigkeit der elektrischen Unterstützung. Der Elektromotor trägt zur Reduzierung der Ermüdung bei und kann an Steigungen oder immer dann eingesetzt werden, wenn es mal etwas schneller gehen soll.

*Hybrid*



#### // LITHIUM-IONEN-AKKU

14,5 Ah Lithium-Ionen-Akku für eine größere Reichweite. Auf dem Display wird die verbleibende Akkukapazität angezeigt.



#### // LEISTUNGSSTARKER 250 WATT MOTOR

Der leistungsstarke 250 Watt Motor ist ideal für hügeliges Gelände oder größere Entfernungen.



#### // NÜTZLICHER NIEDRIGER GEPÄCKTRÄGER

Der niedrige Gepäckträger kann für alle standardmäßigen Satteltaschen verwendet werden. Diese Option ist für alle ATTITUDE Modelle erhältlich.



#### // ERGONOMISCHE V-KURBEL

Die ergonomische Griffposition verhindert, dass die Kurbel mit dem Körper in Berührung kommt, vor allem beim Manövrieren um Kurven.

**ATTITUDE**

POWER

DAS LEISTUNGSSTARKE ZUGGERÄT



Das ATTITUDE Power bietet 100 % Elektroantrieb vom Komfort des Rollstuhls aus. Es entlastet deinen Oberkörper. Steigungen oder längere Strecken stellen keine Herausforderung mehr dar. Einfach entspannen und die Fahrt genießen!

*Power*



**//LEISTUNGSSTARKER  
250 WATT MOTOR**

Der leistungsstarke 250 Watt Motor ist ideal für hügeliges Gelände oder größere Entfernungen.



**// VERSTELLBARER LENKER**

Der ergonomische Lenker lässt sich über den Lenkervorbau in der Höhe verstellen. Auf dem Display werden verschiedenen Fahroptionen angezeigt.



**// LITHIUM-IONEN-AKKU**

9 Ah oder 13,4 Ah Lithium-Ionen-Akku für eine große Reichweite. Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt.



**// INTEGRIERTER FRONTSCHLEINWERFER**

Der helle Frontscheinwerfer wird direkt vom Akku betrieben.